



3M France - Marchés de la Santé  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

## FICHE TECHNIQUE

### **3M™ Tegaderm™ Alginate**

Pansement alginate à haute intégrité

Marquage CE 0086, classe II b, selon la directive 93/42 CEE

#### **I – Indications**

- Plaies moyennement à fortement exsudatives au stade de détersion et de bourgeonnement (escarres, ulcères veineux, artériels et diabétiques, dermabrasions, brûlures, sites donneurs de greffe, plaies avec perte de substance, plaies cavitaires)
- Plaies infectées selon avis et suivi médical
- Plaies hémorragiques

La prise en charge est assurée pour le traitement des plaies chroniques en phase de détersion et des plaies très exsudatives.

#### **II- Caractéristiques**

Tegaderm™ Alginate est un pansement primaire très absorbant sous forme de compresse stérile. Il est composé de 100% de fibres d'alginate non tissées, polymères naturels issus d'algues marines brunes (phéopycées). Les alginates ont la propriété de gélifier rapidement en présence d'exsudats. Le pansement Tegaderm™ Alginate peut ainsi absorber jusqu'à 20 fois son poids d'exsudats. Ceci permet d'éloigner l'exsudat en excès de la plaie et de la peau périlésionnelle afin d'éviter toute macération tout en conservant un milieu humide au niveau de la plaie, indispensable à un processus de cicatrisation optimal.

Tegaderm™ Alginate, par son effet drainant, permet aussi d'aider à la détersion des plaies en capturant les débris fibrinonécrotiques ainsi que les bactéries.

La structure originale de Tegaderm™ Alginate lui permet de bénéficier d'un haut pouvoir d'intégrité (résistance mécanique à l'étirement) pour un retrait facilité, en un seul tenant et sans laisser de résidu sur la plaie.

Composé d'une majorité d'alginate de calcium, Tegaderm™ Alginate possède aussi d'excellentes propriétés hémostatiques.

Enfin, la nature des alginates employés dans Tegaderm™ Alginate lui confère une grande souplesse pour une conformabilité maximale et un meilleur confort pour le patient. Ainsi Tegaderm™ Alginate est bien supporté par le patient et s'adapte facilement aux reliefs y compris dans le cas de plaies anfractueuses.

- **Composition**

- Fibres non tissées d'alginate de calcium > 93% (CAS n° 9005-35-0)
- Fibres non tissées d'alginate de sodium < 7% (CAS n° 9005-38-3)

Tegaderm™ Alginate ne contient pas de latex, de colophane, de paraben ni de phtalate.

- **Date d'expiration du produit et conservation**

Ce produit doit être stocké à température ambiante. Éviter une chaleur ou une humidité excessive. Pour la durée de vie, se référer à la date de péremption indiquée sur l'emballage.

### III- Mode d'emploi

- **Application du pansement**

Nettoyer la lésion avec une solution de sérum physiologique. Le cas échéant, découper avec des ciseaux stériles le pansement pour l'adapter à la taille et la forme de la plaie. Appliquer directement le pansement sur la plaie. Prendre soin de ne pas déborder sur la peau avoisinante. Si besoin, humidifier le pansement avec du sérum physiologique. Appliquer ensuite un pansement secondaire (film polyuréthane Tegaderm™ Film ou une compresse associée à une bande).

- **Changement du pansement**

Pour faciliter le retrait, humidifier le pansement avec du sérum physiologique.

La fréquence de changement du pansement dépend du niveau d'exsudat de la plaie : quotidiennement pour une plaie très exsudative, tous les 2 jours pour les plaies moyennement exsudatives.

- **Précautions d'emploi**

Tegaderm™ Alginate peut être utilisé en cas de plaie infectée, sous surveillance médicale et avec une prise en charge spécifique adaptée.

Ne pas utiliser sur les plaies sèches ou en phase d'épidermisation.

Ne pas mettre Tegaderm™ Alginate en contact avec une solution alcaline ou de Dakin.

En cas d'utilisation d'un antiseptique avant la pose, bien rincer la plaie avant d'appliquer Tegaderm™ Alginate.

Retirer Tegaderm™ Alginate avant toute séance de radiothérapie.

En cas de résidus légers, les éliminer à l'aide de sérum physiologique.

### IV- Conditionnement

L'emballage de Tegaderm™ Alginate ne contient pas de latex.

– **En ville**

Code ACL 7	Code LPP	Code ACL 13	Référence	Dimensions cm x cm	Pansements/boîte	Boîtes/carton
9851573	1316633	8711428064650	90112	10 x 10	10	5
9851596	1342174	4046719428380	90114	10 x 20	10	2

Remboursement conforme à la LPPR

– **A l'hôpital**

Code commande	Référence	Dimensions cm x cm	Pansements/boîte	Boîtes/carton
TEG90112	90112	10 x 10	10	5
TEG90114	90114	10 x 20	5	4
TEG90120	90120	Mèche 30cm	5	4