



INDICATIONS

La compresse non-adhérente **MELOLIN** est utilisée pour les plaies faiblement à modérément exsudatives telles que:

- Abrasions et lacérations.
- Brûlures légères.
- Plaies propres et suturées.

DESCRIPTION

MELOLIN est une compresse stérile très absorbante.

- Le film perforé, non adhérent à la plaie, facilite un drainage rapide de l'exsudat et protège le bourgeon charnu auquel il n'adhère pas lors du retrait de la compresse.
- La compresse de coton/fibres de polyester absorbe exsudat et saignement et protège la plaie contre les chocs.
- Le feuillet hydrophobe protège la compresse des souillures externes et empêche les exsudats de traverser le pansement.

MELOLIN conserve son intégrité même coupé.

MELOLIN est inerte et non sensibilisant.

COMPOSITION DU PRODUIT

Absence de latex, colophane, phtalate (DEHP) et PVC :

Face externe hydrophobe:	Support non tissé en polyester.
Couche centrale absorbante :	Compresse composée de coton et de fibres de polyester.
Film non adhérent à la plaie :	Film de polyester perforé.

CONDITIONNEMENT

CONDITIONNEMENT PRIMAIRE :

Absence de latex, métaux lourds et PVC.

La compresse est conditionnée dans un sachet individuel thermosoudé pelable (papier à usage médical).

CONDITIONNEMENT SECONDAIRE :

Carton recyclable.

CONTRE-INDICATION

Aucune

MELOLIN[®]

**Compresse stérile absorbante et
non-adhérente**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Usage unique.
- Ne pas utiliser si l'emballage a été ouvert ou endommagé (perte de la garantie de stérilité).

PARTICULARITES D'UTILISATION

Poser la compresse face brillante sur la plaie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Découpable : OUI NON

Spécification du produit fini : Masse surfacique : 230-280 g/m².

Stérilisation : Chaleur humide.
(conformément aux exigences des normes EN 556 et EN ISO 17665)

Durée de vie et conditions de stockage : 5 ans à l'abri de l'humidité, à une température n'excédant pas 25°C.

Procédé de destruction : Incinération.

PRESENTATIONS COMMERCIALES

Hôpital :

Code produit	Dimensions (cm x cm)	Unité de commande	Carton standard
66974940	5 x 5	100 compresses	2400
66974941	10 x 10	100 compresses	1200
66974939	20 x 10	100 compresses	600

Pharmacie :

Code produit	Dimensions (cm x cm)	Code ACL 13	Unité de commande
66974932	5 x 5	3401062492845	Boîte de 25 compresses
66974933	10 x 10	3401062513588	Boîte de 10 compresses
66974939	20 x 10	3401062513649	Boîte de 100 compresses

MELOLIN[®]

**Compresse stérile absorbante et
non-adhérente**

INFORMATIONS TECHNICO-REGLEMENTAIRES

Classe du dispositif médical :	I, stérile – Règle 4 (Dir. 93/42/CEE-annexe IX)
Marquage CE :	Certificat n°CE 56481
Code CLADIMED :	F51EA02
Code GMDN :	46854
Organisme notifié :	BSI – n°2797
Etiquetage :	Conforme à l'annexe I de la directive 93/42/CEE
Fabricant :	Fabriqué pour Smith & Nephew Medical Limited - Hull HU3 2BN – Angleterre – Certifications ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001
Mandataire :	Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemannenstraße 14 - 78532 Tuttlingen - Allemagne
Distributeur :	Smith & Nephew S.A.S. 92200 Neuilly sur Seine Certification ISO 9001
Contrôles du produit fini :	<ul style="list-style-type: none">- Contrôle visuel des sachets (tenue des scellages)- Masse surfacique du support- Dimensions- Stérilité
Sécurité biologique :	Conforme à la norme EN ISO 10993 : Evaluation biologique des dispositifs médicaux.
Biocompatibilité :	Inerte et non sensibilisant.