

<i>Description générale</i>	Set comportant un bac à shampooing gonflable , un gonfleur et un réservoir avec douchette		
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo	
<i>Référence lot</i>	Non		
<i>Dispositif raccordé</i>	Non		
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non		
<i>Dispositif stérile</i>	Non		
<i>Stérilisation</i>	Non		
<i>Autoclavable</i>	Non		
<i>Nettoyage</i>	Oui	A l'eau et au savon.	
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant le PVC et le polypropylène		
<i>Pièces constitutives</i>	Non		
<i>Matières</i>	Bac à shampooing et réservoir en PVC Gonfleur en Polypropylène		
<i>Contient du latex</i>	Non		
<i>Etiquetage</i>	Non		
<i>Stockage particulier</i>	Non		
<i>Références + extensions</i>	16 350 40	16 350 45	16 350 42
<i>Désignation</i>	Bac à shampooing	Réservoir et douchette	Gonfleur pour bac à shampooing
<i>Emballage</i>	Dans une boîte en carton comprenant la référence, une photo, le logo, l'adresse, mode d'emploi,dimensions, marquage sans Latex, flashcode.	Dans une boîte en carton comprenant la référence, une photo, le logo, l'adresse, mode d'emploi,dimensions, marquage sans Latex, flashcode.	Par sachet plastique unitaire scellé et mis dans une boîte en carton comprenant la référence, une photo, le logo, l'adresse, marquage sans Latex, flashcode.
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	Non	Non
<i>Dimensions extérieures Lo x La x H (mm)</i>	65x58x19 Longueur du tube de vidange :50cm	51x32.5 Longueur du tube : 70cm	17.5
<i>Dimensions intérieures Lo x La x H (mm)</i>	45x37x19	/	/
<i>Epaisseur (mm)</i>	0.3	0.3	/
<i>Contenance/Capacité (ml)</i>			/
<i>Poids net (g)+- 1%</i>	519	209	50.6
<i>Couleurs</i>	Blanc	Blanc	Blanc et noir
<i>Mode d'emploi</i>	Dépliez le bac à shampooing de manière à ce que celui-ci perde ses marques de plis. Gonflez le à l'aide du gonfleur ou à la bouche. Placez le bac sous la tête du patient en respectant l'emplacement pour la nuque. Placez l'extrémité du tuyau de vidange dans un récipient situé plus bas que le bac à shampooing. Après le shampooing, rincez avec de l'eau. Pour évacuer l'eau du bac, ouvrez la bouche d'évacuation située au fond du bassin. Vous pouvez ensuite retirer le bac de la tête du patient.		
<i>Précaution d'emploi et/ou avertissement usage unique</i>	Veillez à bien rincer et sécher le bac après utilisation. Pour un meilleur séchage, laissez le bac gonflé quelques heures		
<i>Recyclage</i>	Oui		
<i>Récupération</i>	Dans les containers adéquats.		
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non		
<i>Phtalates/PVC</i>	Non/Oui		
<i>Rohs</i>	Conforme		
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul		