


Abri-San Premium 6

INCONTINENCE

ABRI-SAN
Premium



30 x 63 cm

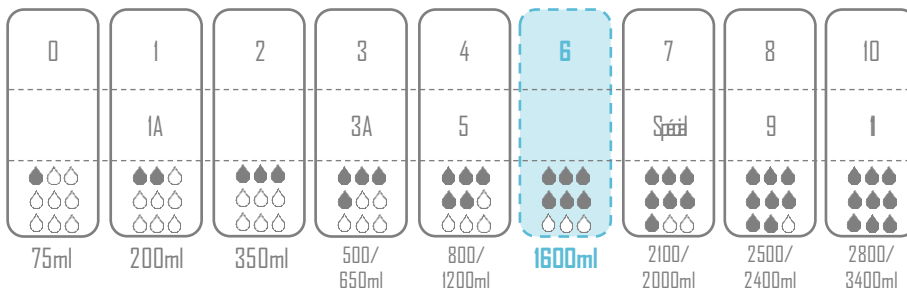

UTILISATEURS

SEMI-AUTONOME

ALITÉ

INCONTINENCE LOURDE



Top Dry - Effet garde-au-sec

La couche d'acquisition est située entre le coussin absorbant et le voile externe supérieur. Elle se compose d'un alliage de fluff et non-tissé. Sa fonction est d'améliorer l'absorption rapide du liquide et de favoriser sa répartition sur une zone plus large, ralentissant ainsi la saturation du change. Hydrophile, la couche d'acquisition laisse pénétrer le liquide mais l'empêche de ressortir, permettant ainsi à la surface interne du change de rester sèche.



Forme anatomique

Les protections Abri-San Premium ont été conçues pour s'adapter à la morphologie des utilisateurs, limitant ainsi le risque de fuites.



Système anti-odeurs

Les agents super absorbants (SAP) absorbent le liquide et capturent les odeurs à l'intérieur du change.



Barrières anti-fuites

Les barrières anti-fuites hydrophobes sont situées au niveau des jambes et permettent un ajustement parfait du change à la morphologie de l'utilisateur.



Air Plus - Voile externe respirant

Le voile externe laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.



Témoin de saturation

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide. L'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation facilement.


DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% Fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF-free)
Couche d'acquisition	Couche d'acquisition et de distribution en non-tissé
Non-tissé	Coverstock polypropylène, non-tissé hydrophile permanent
Ailes	Polypropylène hydrophobe
Elastiques	Elasthane, sans latex
Voile externe	Voile externe textile respirant (BTBS)
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates
SAP	Super absorbant, polyacrylate, sans phtalates



Abri-San Premium 6

DIMENSIONS PRODUIT

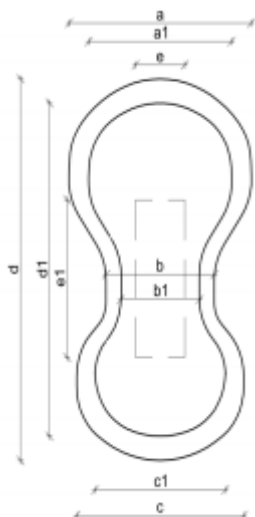

d	Longueur	630 mm
a	Largeur, devant	280 mm
c	Largeur, arrière	300 mm
b	Largeur, entre-jambes	200 mm

Cœur absorbant

d1	Longueur	560 mm
a1	Largeur, devant	230 mm
c1	Largeur, arrière	240 mm
b1	Largeur, entre-jambes	150 mm

Couche d'acquisition (ADL)

e1	Longueur	260 mm
e	Largeur	100 mm

ABSORPTION

Poids produit : 56 g

Test Rothwell ISO 11948-1	1600 ml
Absorption Méthode Hy-tec PA02/02	-
Temps d'absorption Méthode Hy-Tec PA02/03	-
Rewet Méthode Hy-Tec PA02/04	-



Dispositif médical
Classe 1
93/42/CEE



Ecolabel Nordic
Swan
Produits respectueux de
l'utilisateur et de son
environnement



Testé dermato-
logiquement
Produits sans risques
d'iritation



ISO 9001
ISO 14001

OHSAS
18001:2008

Management de la
santé et de la
sécurité au travail



GMP
Good
Manufacturing
Practices

DONNÉES LOGISTIQUES




Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton	
3	34	102	
Cartons / Palette	Hauteur palette	Cartons / Palette gerbée	
16	1,190 m	32	
EAN Sachet		EAN Carton	
57 03538 335136		57 03538 335150	
Dimensions carton	Poids brut carton	Poids net carton	Dimensions sachet
60,1 x 36 x 26 cm	6 901 g	6 426 g	34 x 19 x 26 cm




Abri-San Premium 6

GUIDE D'UTILISATION


POSITION COUCHÉE

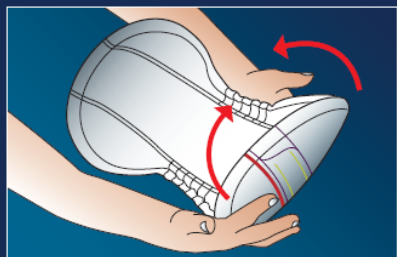


1 Former une gouttière en pliant le change sur sa longueur. Ne pas toucher l'intérieur de la protection.

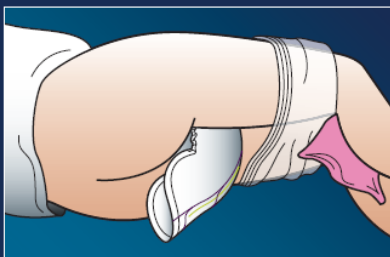

2 Slip de maintien au dessus des genoux. Positionner la protection, « gouttière » en main, entre les jambes.

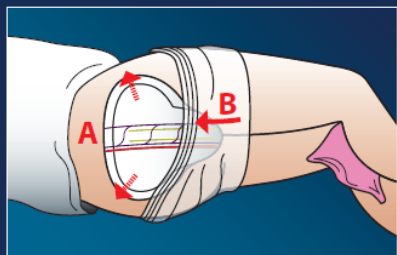

3 A - Veiller à centrer la protection. Ajuster la protection sur l'arrière. B - Puis positionner le slip de maintien.

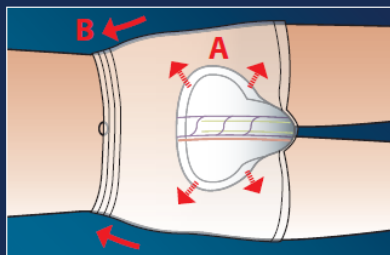


4 A - Utilisateur sur le dos, ajuster la protection sur l'avant. B - Remonter le slip de maintien en position short.

POSITION DEBOUT



1 Toujours veiller à faire la gouttière, slip de maintien aux genoux. Assurez-vous que le résident est bien en appui.

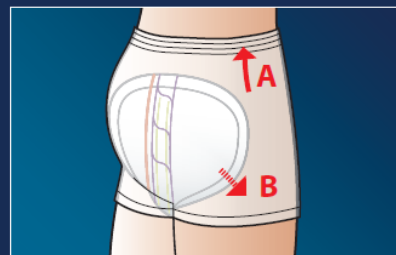

3 A - Remonter le slip de maintien en position short. B - Réajuster la protection afin que ses bords suivent l'aine.

PRODUITS ASSOCIÉS



Faites votre choix parmi notre gamme de slips de maintien en fonction de votre utilisation

ABRI ♦ FIX

Durabilité

Soft Cotton Panty	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Soft Cotton Slip	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Soft Cotton Leaf	XS	S	M	L	XL	XXL	
Pants Super	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL 4XL 5XL
Pants	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL
Net	XS	S	M	L	XL	XXL	
One	ONE size						



www.abena-frantex.fr

