

HEXANIOS G+R

Détergent
Pré-désinfectant
de l'instrumentation

PRODUIT
A DILUER
25 ml > 5L



0,5%
15 min.




INDICATIONS

- Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie.
- Ramassage de l'instrumentation souillée.

PROTOCOLE D'UTILISATION

INSTRUMENTATION

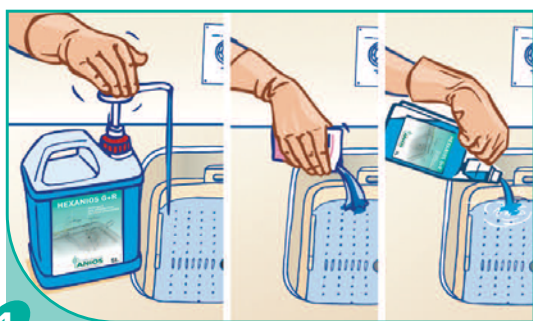

1

Dilution à 0,5% : verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.



2

15 min.

Immerger complètement le dispositif médical.
Temps de trempage minimum : **15 minutes**.
Brosser, écouvillonner si nécessaire.



3

Rincer soigneusement et abondamment à l'eau de réseau.

-> Matériel autoclavable :

Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.
Le statut réglementaire des produits (dispositif médical ou produit biocide) est précisé sur l'étiquette