

ANIOSYME DD1

CE
0459

Détergent
pré-désinfectant
de l'instrumentation

PRODUIT
A DILUER
25 ml → 5L




0,5%
5 min.



INDICATIONS


Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. Nettoyage en bacs à ultra-sons. Ramassage de l'instrumentation souillée.

PROTOCOLE D'UTILISATION ENDOSCOPIE

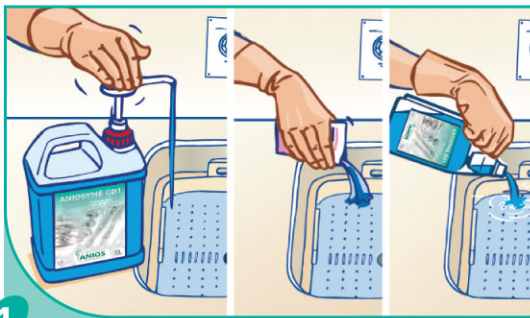


1

Dilution à 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

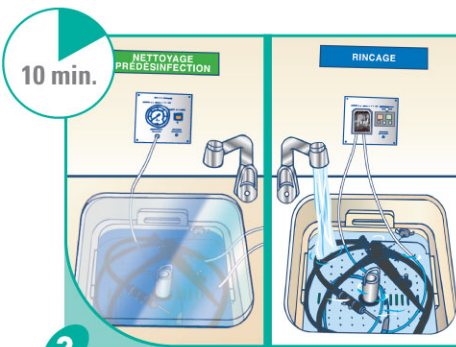

2

Premier nettoyage : Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage minimum : 10 minutes. Brosser si nécessaire. Irriguer les canaux et rincer soigneusement à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique), l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.

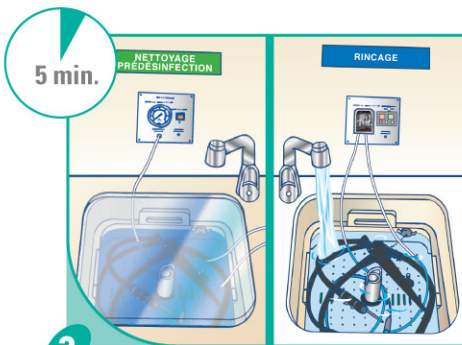

2

Second nettoyage : Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage minimum : 5 minutes. Irriguer et rincer soigneusement à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique), l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.

- ➔ **Matériel thermosensible :**
Passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)
- ➔ **Matériel autoclavable :**
Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Stockage entre +5°C et +35°C.