

ANIOSYME DD1

CE
0459

Détergent
pré-désinfectant
de l'instrumentation

PRODUIT
A DILUER
25 ml → 5L




0,5%
5 min.



INDICATIONS


Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique. Nettoyage en bacs à ultra-sons. Ramassage de l'instrumentation souillée.

PROTOCOLE D'UTILISATION INSTRUMENTATION

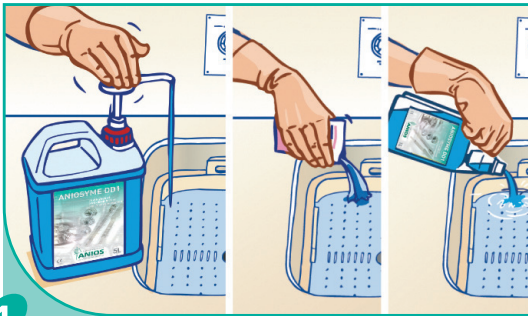

1

Dilution à 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.

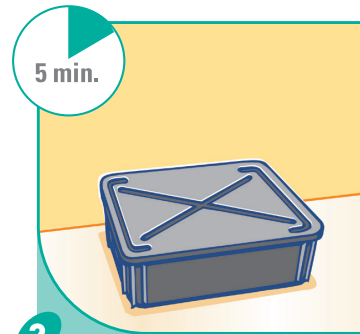

2

5 min.

Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage : **5 minutes minimum**. Brosser, écouvillonner si nécessaire.



3

Rincer soigneusement et abondamment à l'eau de réseau.

- **Matériel thermosensible :**
Passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement)
- **Matériel autoclavable :**
Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante (voir procédure interne à l'établissement).

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Stockage entre +5°C et +35°C.