


ANIOSURF Premium

Détergent désinfectant
sols et surfaces




**PRODUIT
A DILUER**
soit 20 ml > 8 L

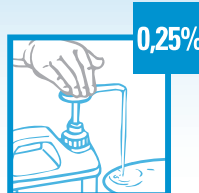

INDICATIONS


Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériels (y compris le matériel médical).

PROTOCOLE D'UTILISATION

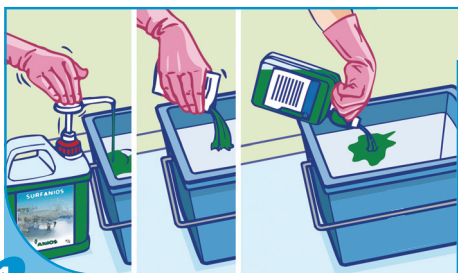

1

Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. **Dilution à 0,25 %** : verser une dose de 20 ml d'ANIOSURF Premium.

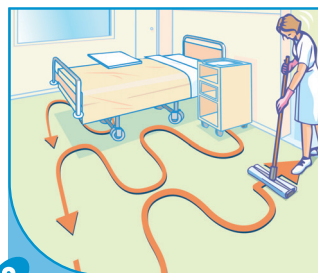

2

Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. Ne pas rincer les surfaces.



3

Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



4

Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

Fréquence d'utilisation	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
ANIOSURF Premium							

Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2 - directive 98/8/CE)