

FICHE TECHNIQUE : Trousse de secours pour membre sectionné

Kit de premiers secours en cas de doigts et mains coupés avec kit de récupération de membre sectionné
Ce kit est indispensable pour transporter dans les meilleures conditions le membre ou le fragment de membre afin de permettre par la suite un greffage.

Composition:

1x Tousse ABS avec support 25cm x 19cm x 9cm
1x Sac isotherme grand modèle 28cm x 35cm
2x Paire de gants latex non poudré stériles taille XL.
1x Pansement absorbant stérile 10 cm x 10 cm
1x Kaltostat – Pansement hémostatique Stérile 5x5cm
5x 5 Compresses stériles de gaze 7,5 cm x 7,5 cm
1x Couverture de survie
2x Sac de froid instantané

1x Fiche d'identification du membre et du blessé
1x Stylo



APPORTER LES PREMIERS SECOURS :

Mettre le blessé en Position Latérale de Sécurité

Le membre sectionné doit être surélevé pour éviter que le sang ne s'écoule vers le bas

Mettre les gants stériles et appliquer le pansement absorbant stérile avec le Kaltostat (hémostatique) sur la blessure directement. Compléter le dispositif avec des compresses stériles si nécessaire pour éviter l'écoulement du sang tout en maintenant la compression.

Ne pas poser de garrot sauf avis médical, dans ce cas reporter obligatoirement l'heure de pose du garrot.

Utiliser la couverture de survie pour garder la chaleur du corps (face or vers l'extérieur) ou pour préserver le corps de la chaleur (face argent vers l'extérieur).

Prévenir les secours SAMU : 15 ou à l'international : 112.

PRESERVER LE MEMBRE :

- Activer les poches de froid

- Mettre (ou les changer) les gants stériles et prendre le(s) membre(s) sectionné(s) pour le placer dans le sachet isotherme, entouré d'une ou 2 poches de froid, préalablement activées (appuyer fortement au milieu)

- Vérifier que le froid est suffisant et refermer le sachet isotherme

- Remplir la fiche d'identification du membre sectionné

Attendre les secours, tout en essayant de maintenir le blessé éveillé, sans lui donner à boire ou à manger.

SARL Fournisseur Matériel Médical (F.M. MEDICAL)
2, RUE DE LA JUSTICE. 62410 - BENIFONTAINE – France
RCS ARRAS 532 788 700
Tél : 09 51 51 95 71

email : contact@fournisseur-medical.com

site web : www.fournisseur-medical.com

