


ANIOSURF

parfums citron ou fraîcheur


Détergent désinfectant sols et surfaces



Protocole d'utilisation

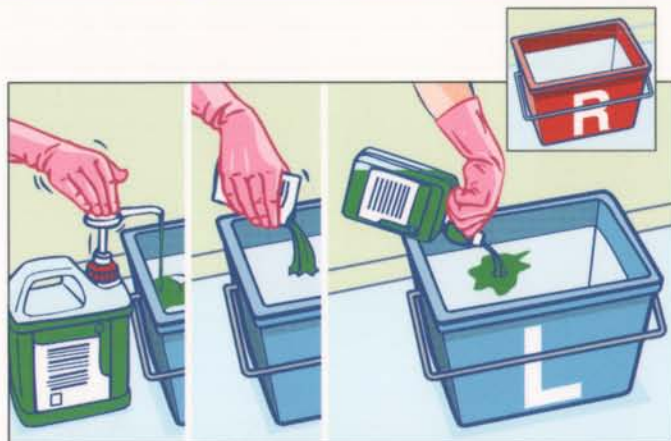

- 1 Remplir un seau de lavage et un seau de rinçage avec 8 litres d'eau. **Dilution à 0,25 %** : Verser une dose de 20 ml d'ANIOSURF dans le seau de lavage.

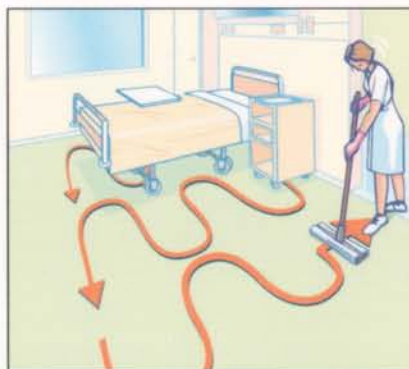

- 2 Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie.



- 3 Rincer, essorer la chiffonnette avant de la tremper dans le seau de lavage. (Le chariot de ménage ne doit pas être placé dans la pièce mais dans le couloir).



- 4 Après le nettoyage de chaque secteur, changer chiffonnette et eau de rinçage, renouveler la solution de lavage.

Fréquence d'utilisation	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
ANIOSURF							

Indications

Nettoyage et désinfection des sols, murs et autres surfaces.

Propriétés microbiologiques

ANIOSURF Citron et ANIOSURF Fraîcheur sont conformes aux Normes AFNOR et européennes d'efficacité antimicrobienne : Bactéricide (NF EN 1040, pr EN 13713, NF EN 1276, T 72-301). Actif sur Mycobacterium tuberculosis, Fongicide (T 72-301). Actif sur Candida albicans (NF EN 1275). Actif sur le virus HIV-1.

Composition qualitative

Chlorure de didécylidiméthylammonium, dérivés biguanidiques, complexants des ions Ca²⁺ et K⁺, tensio-actifs non ioniques, colorants, parfum.

Précautions d'emploi

Se référer à la fiche de données de sécurité et à l'étiquette. Produit classé selon la Directive Européenne "Préparations dangereuses" 1999/45/CE.