



3M France - Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

FICHE TECHNIQUE :

3M™ Nexcare™ Cold Hot™ Cold Instant

Coussin pour cryothérapie à usage unique

Marquage CE classe IIa selon la règle 4 de l'annexe IX de la Directive 93/42

I - Indications

Nexcare™ ColdHot™ Cold Instant est un coussin de froid instantané à usage unique à base d'urée et d'eau. Dans le coussin, l'eau est dans un sachet séparé qui l'isole de l'urée. En mélangeant les deux composants (par l'éclatement de la poche d'eau) une réaction endothermique se produit et le coussin refroidit.

Nexcare™ ColdHot™ Cold Instant a été créé pour soulager rapidement les symptômes occasionnés par des traumatismes mineurs, des entorses et des foulures. Cold Instant offre du froid instantané pour soulager immédiatement la douleur. L'application immédiate de froid sur la région affectée aide à diminuer l'inflammation. Ce produit offre une source de froid, utilisable à tout moment en toute sécurité, aussi bien à la maison qu'ailleurs.

II – Caractéristiques

- **Composition :**

- Eau
- Urée
- Enveloppe en Polyéthylène/ Polyamide

- **Dimensions :**

Coussin Cold Instant 180 (± 5) mm x 150 (± 5) mm

- **Poids :**

270+/- 20g

- **Biocompatibilité :**

Non applicable.

- **Stérilisation :**

Non approprié

- **Durée de vie du produit et conservation :**

La durée de vie du produit est de 3 ans à partir de la date de fabrication. Le produit fini ne nécessite pas de condition de conservation particulière.

- **Mode d'élimination :**

Le produit ne requiert pas de condition environnementale particulière quant à son utilisation ou son élimination.

Éliminer ce produit avec vos déchets communs.

III – Avantages

Favorise la diminution des inflammations en petite traumatologie

Pratique et facile à utiliser

Idéal pour le sport et les voyages



3M France - Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

L'activation ne nécessite aucun matériel réfrigérant particulier
Sans substance médicamenteuse, utilisable à tout moment en toute sécurité

IV - Origine

Fabriqué en Allemagne.

V - Mode d'emploi, précautions d'usage, restrictions

Se reporter à la notice à l'intérieur de la boîte.

Produit à usage unique.

Pour activer le coussin, presser fermement avec les pouces sur la zone centrale (indiqué par le pictogramme) et malaxer ensuite le produit afin de distribuer uniformément le liquide froid à l'intérieur de la poche.

Premiers soins suggérés : si le produit rentre en contact avec les yeux, enlever immédiatement le coussin. Rincer abondamment avec de l'eau. Enlever les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent être enlevées facilement. Continuer à rincer. En cas de contact avec la peau, rincer la peau gelée avec de l'eau tiède. Ne pas frotter la zone affectée. En cas d'ingestion rincez la bouche, n'inducez pas de vomissement. Appelez immédiatement votre médecin ou centre antipoison.

Ne pas utiliser dans les cas suivants :

- Maladies pour lesquels le froid est contre indiqué (p. ex : Syndrome de Raynaud, allergie au froid, maladie vasculaire périphérique, arthrite rhumatoïde)
- Problèmes de sensibilité cutanée
- Hypertension non-traitée

VI -Conditionnement

- **En ville**

Code ACL	Référence	Description	Dimensions cm x cm	Coussin/ boîte	Boîtes/ carton
9921279	N1574DU	ColdHot™ Cold Instant Double Pack	15x18	2	6

- **A l'hôpital**

Code commande	Référence	Description	Dimensions cm x cm	Coussin/ boîte	Boîtes/ carton
9921279	N1574DU	ColdHot™ Cold Instant Double Pack	15x18	2	6
N1574BU	N1574BU	ColdHot™ Cold Instant Bulk	15x18	20	1