



Marque :	/
Classe CE :	I, non stérile
Durée de vie :	3 ans
Année de mise sur le marché :	1983 en France
Code CLADIMED :	M50AD01
Code CND :	/
Code GMDN :	33521
Version :	E
Date :	13/06/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Bande constituée d'un support en fibranne rigide enduit sur une seule face d'une masse adhésive à l'oxyde de zinc, exempte de caoutchouc naturel, préparée en vue d'adhérer sur la peau par simple pression. La bande se présente bobinée sur un tube carton imprimé.

Caractéristiques

- Pouvoir adhésif élevé,
- Sécable à la main
- Support inélastique, apporte un soutien,
- Découpe à bords dentelés, ce qui évite les fils flottants,
- Tension de déroulement continue,
- Examen radiologique possible sans retrait de la bande,
- Stérilisation non recommandée,
- Formule sans latex, sans phtalates.

Composition

Support : tissu blanc, en fibranne, 100 % viscosse.

Masse adhésive : principalement composée de résines synthétiques, de lanoline, d'élastomères de synthèse, d'oxyde de zinc et ester de colophane partiellement hydrogénée.

Contrôles des matières premières et des produits finis

✓ Matières premières

Support : Grammage, épaisseur, contexture, résistance mécanique.

Résines synthétiques : Essai de solubilité, spectrométrie IR

Elastomères de synthèse : Essai de solubilité, k value, spectrométrie IR.

Lanoline : Selon la pharmacopée européenne en vigueur.

Oxyde de zinc : Densité, granulométrie, identification.

Colophane hydrogénée : Indice d'acide, viscosité, couleur.

✓ Produits finis

Contrôle quantitatif et qualitatif de la masse adhésive.

Contrôle de l'adhésivité sur acier par pelage.

Conditionnement / Stérilisation

Présentations en boîtes individuelles et regroupées par 5 sous film ou en plateau, au nombre de 4, comprenant chacun 6 rouleaux soit un total de 24 rouleaux par boîte. Produit livré non stérile.

Références

Présentations sans vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809055153	71496-19	10 m x 4 cm	10	90	
4042809055122	71496-18	10 m x 2,5 cm	10	30	

Présentations avec vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809055061	71496-16	10 m x 4 cm	5	90	6313763
4042809055092	71496-17	10 m x 2,5 cm	5	30	6313770

Présentation plateau – Utilisation fréquente (4 plateaux de 6 rouleaux)

Code EAN13	Code Produit	Dimensions	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809010985	71490-00	10 m x 4 cm	24	24	

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et à une température ne dépassant pas 25°C.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Contention articulaire rigide,
Traumatologie sportive (entorse...),
Orthopédie (luxation congénitale de hanche...),
Tractions adhésives continues.

Contre-indications

Allergie aux produits de synthèse.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Se conformer aux informations mentionnées sur l'emballage. Strappal® peut s'utiliser seul pour la réalisation d'une contention articulaire rigide selon la technique dite "Taping".

1. Dérouler la bande,
2. Prédécouper la bande aux longueurs voulues,
3. L'appliquer en tension selon la pathologie à traiter et sans réaliser de circulaires complètes, afin d'éviter tout effet garrot,
4. Lisser pour renforcer l'adhésivité du montage.

Strappal® peut également s'utiliser en complément d'une contention adhésive souple préexistante pour renforcer sa force de contention et limiter l'amplitude du mouvement.

Précaution d'emploi

Enlever le pansement lorsque le malade passe un examen radiologique ou subit un traitement par irradiation (risque d'opacification des clichés radio ou diffraction du rayonnement ionisant en cas de traitement).

Particularités d'utilisation

Doit être appliqué sur peau sèche et propre.
Ne pas utiliser plus de 30 jours.

Accessoires associés

Pansements et compresses.

Entretien

Non applicable. Usage unique.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES**Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Conforme à la LPPR.

Procédés de destruction

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN Medical SAS Rue du Millénaire F-72320 Vibraye Site certifié ISO 13485, 14001 & 45001