

Fiche Technique

Rev. 03 - 13/01/2017 - Mod. 71A2 - FR

PBS 0,8



DONNÉES TECHNIQUES:

Collecteur à usage unique pour l'élimination d'objets piquants, coupants et tranchants. Modèle conçu pour les postes à faible production de déchets (plateau de soins, chariot, cabinet médical, au domicile du patient,...)

- ▶ **Matériau:** 100 % polypropylène vierge
- ▶ **Coloris:** Collecteur jaune, Couvercle rouge. Matériau coloré avec masterbatch sans métaux lourds. Matériau conforme REACH
- ▶ **Épaisseur:** Fonds et paroi latérale: 1,9 mm
Couvercle et système de fermeture : 1,9 mm
- ▶ **Forme:** Cylindrique
- ▶ **Poids:** 109 gr.
- ▶ **Charge maximale:** 460 gr.
- ▶ **Capacité nominale:** 0,800 Lt.
- ▶ **Capacité réelle:** 0,840 Lt.
- ▶ **Capacité utile:** 0,660 Lt.
- ▶ **Dimensions extérieures:** Ø 100 x 185h mm
- ▶ **Dimensions base:** Ø 75 mm



LOGISTIQUE:

- ▶ **Pcs. / carton:** 100 pcs. (corps et couvercle monté)
- ▶ **Dimensions carton (LxH):** 62x41x31 cm H
- ▶ **Pcs. / palette:** 2400 pcs.
- ▶ **Dimensions palette:** 124x82x220 H cm

CERTIFICAZIONI:

- ▶ Conforme à la norme NF X-30-511
- ▶ Conforme à la Marque NF 302 (Tests réalisés par le Laboratoire National d'Essais - LNE)
- ▶ Conforme à la norme ISO 23907 - Kite Mark
- ▶ Conforme au TRBA
- ▶ Conforme FDA K071517
- ▶ Conforme à l'accord ADR - Certificat UN

INSTRUCTIONS

► Montage du couvercle:

Poser le couvercle sur le collecteur et appuyer fortement avec la paume de la main tout autour du couvercle. Des "clic" se font entendre à chaque pression et attestent la fermeture du couvercle



► Fermeture provisoire:

Le collecteur peut être fermé provisoirement en positionnant le bouchon du couvercle avec la partie creuse vers le haut.



A ce stade, la réouverture est possible

► Fermeture définitive:

Le collecteur peut être fermé définitivement en positionnant le bouchon du couvercle avec la partie pleine vers le haut jusqu'à entendre le "clic".



A ce stade, la fermeture est définitive

UTILISATION:

► Pendant l'utilisation, ouvrir et fermer le collecteur en utilisant le couvercle du côté de la fermeture provisoire



► Fermer le collecteur définitivement en utilisant le couvercle du côté de la fermeture définitive



- Orifice de grande taille
- Le collecteur peut être autoclavé à 134 ° pendant 18 minutes (certificat LNE disponible sur demande)
- Lors de l'incinération, les collecteurs sont éliminés sans émission de gaz nocifs ni dépôts de métaux lourds

► **Désolidarisation des aiguilles:**

Utiliser les encoches en "V" pour désadapter l'aiguille de la seringue et/ou dévisser les aiguilles de prélèvement sous vide



Utiliser les encoches en "V" pour désadapter l'aiguille de la seringue et/ou dévisser les aiguilles de prélèvement sous vide



► **SUPPORTS DISPONIBLES:**

► Support avec pince pour fixer le collecteur PBS 0,6 Lt sur chariot ou au mur

► Plateau de soins avec emplacement pour le collecteur PBS 0,6 Lt.

► Support paille à ventouses pour fixer le collecteur PBS 0,6 Lt.



► **AVANTAGES:**

- Système de fermeture solidaire du dispositif, hermétique et inviolable en fermeture définitive
- Maniable, pratique et facile d'utilisation
- Muni d'une poignée
- Muni d'encoches de désolidarisation permettant de désadapter l'aiguille de la seringue, de dévisser les aiguilles de prélèvement sous vide ainsi que les aiguilles des stylos injecteurs
- Autoclavable selon la norme NFX 30-511)
- Indication du niveau maximum de remplissage
- Fermeture provisoire et définitive
- Supports disponibles

► **INFORMATIONS DE SÉCURITÉ:**

- Ne pas chercher à récupérer des objets à l'intérieur
- Respecter le niveau de remplissage indiqué sur le collecteur: 80 % de la capacité réelle
- Utiliser le collecteur uniquement avec le couvercle monté
- Ne pas chercher à réouvrir le collecteur fermé définitivement
- Le collecteur est à éliminer selon la législation en vigueur