

BANDELETTES DE CONTROLE DU TAUX D'ACIDE PERACETIQUE

Pour solution activée d'ANIOXY-TWIN Concentré

INDICATIONS

Contrôle du taux d'acide peracétique réactif au sein d'une solution de désinfection totale à froid ANIOXY-TWIN Concentré.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser la bandelette de contrôle pour validation de l'activité du bain :
En début de séance ou à la reprise d'activité après interruption.
Toutes les 4 heures d'activité consécutive (au-delà de 10 endoscopes par jour).
En cas d'activité importante ou de conditions particulières (élévation de température...), il peut être nécessaire d'augmenter la fréquence d'utilisation de ces bandelettes.
- Tremper totalement la partie réactive de la bandelette, dans la solution à tester durant 1 seconde.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 10 secondes après trempage.
Ne plus interpréter un résultat obtenu pour une lecture réalisée plus de 15 secondes après trempage.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Les bandelettes sont stables :
- 24 mois si elles sont stockées entre 2 et 8°C.
 - 90 jours après ouverture.

Conserver le flacon fermé afin de garantir la durabilité des bandelettes.


Date d'ouverture :

INFO

La coloration jaune du bain d'ANIOXY-TWIN Concentré indique que le mélange Activateur/Générateur vient d'être effectué MAIS n'indique pas une présence ou non d'Acide peracétique dans la solution.

Seul le virage de la couleur de la bandelette est à prendre en compte.

Couleur Bleue intense à noire,

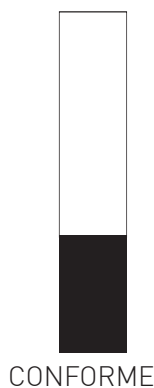

- Pas de couleur,
- Evanescence rapide de la couleur,
- Petits points,
- Bordure colorée,

