

BANDELETTES DE CONTROLE

Pour solution STERANIOS OPA

INDICATIONS

Contrôle de la concentration du STERANIOS OPA au sein d'une solution de désinfection totale à froid du STERANIOS OPA.

MODE D'EMPLOI

- Utiliser la bandelette de contrôle pour validation de l'activité du bain :
En début de séance ou à la reprise d'activité après interruption.
Toutes les 4 heures d'activité consécutive (au-delà de 10 endoscopes par jour).
En cas d'activité importante ou de conditions particulières (élévation de température...), il peut être nécessaire d'augmenter la fréquence d'utilisation de ces bandelettes.
- Tremper totalement la partie réactive de la bandelette, dans la solution à tester durant 2 secondes.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 120 secondes après trempage.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Les bandelettes sont stables :
- 24 mois si elles sont stockées entre 2 et 8°C.
 - 90 jours après ouverture.

Date d'ouverture :

INFO

**La lecture doit être effectuée 120 secondes (2 minutes) après immersion.
Le non respect des conditions peut entraîner une erreur d'interprétation du résultat.**

Même coloration
ou plus intense :

CONFORME

Coloration moins intense :

NON CONFORME

