

	<b>Marque :</b>	<b>Actimove®</b>
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	5 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2002 en France (Changement de design en 2018)
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50CB01
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	13622
	<b>Version :</b>	E
	<b>Date :</b>	13/06/2021

## DONNEES PRODUIT

### Description

Écharpe constituée d'une enveloppe en tissu permettant de soutenir le membre supérieur et de deux sangles de 3,6 cm de largeur, assurant ainsi un maintien du bras en position "coude-au-corps".

### Caractéristiques

- Mise en place facile,
- Tissu léger, respirable et résistant,
- Ajustement de l'écharpe à l'aide des attaches en Y des sangles,
- Sangles de 3,6 cm de largeur,
- Boucles en forme de O, rotation libre,
- Anneau de pouce, limite la rotation de l'avant-bras et maintient la main dans la bonne position,
- Limite les mouvements d'abduction, d'extension et les rotations internes et externes du bras,
- Radiotransparent,
- Modèle ambidextre, disponible en taille S, M, L, XL et universelle,
- Formule sans latex, sans phtalates.

### Composition

Polyester, polyuréthane et polyamide.

### Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

### Conditionnement / Stérilisation

Présentation en sachet individuel. Les dimensions correspondent à la longueur de l'avant-bras. Produit livré non stérile.

### Références

Présentations sans vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Longueur avant-bras	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809017410	72819-65	72819-65	S	< 37cm	1	12	
4042809017441	72819-66	72819-66	M	37-40 cm	1	12	
4042809017472	72819-67	72819-67	L	40-43cm	1	12	
4042809017502	72819-68	72819-68	XL	> 43cm	1	12	
4042809634914	73423-12	73423-12	Universelle		1	16	

## Présentations avec vignette de remboursement

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	D Longueur avant-bras	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809017410	73423-07	72819-65	S	< 37cm	1	12	6113751
4042809017441	73423-08	72819-66	M	37-40 cm	1	12	6113751
4042809017472	73423-09	72819-67	L	40-43cm	1	12	6113751
4042809017502	73423-10	72819-68	XL	> 43cm	1	12	6113751
4042809634914	73423-13	73423-12	Universelle		1	16	6113751

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec.

### INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

#### Indications

Supporte et aide à maintenir le bras immobilisé lors :

- d'une fracture et/ou d'une lésion des tissus souples,
- après une chirurgie de l'épaule.

#### Contre-indications

Aucune connue.

### CONSEILS D'UTILISATION

#### Mode d'emploi

1. Placer le coude et l'avant-bras du membre supérieur lésé dans l'enveloppe et positionner la sangle verticale en travers du dos en passant sur l'épaule valide. Passer l'extrémité de la sangle dans la boucle et fermer l'attache,
2. Positionner la sangle horizontale au niveau du dos et passer l'extrémité dans la boucle et fermer l'attache,
3. Placer le pouce dans l'anneau.
4. Veiller à ce que la main soit légèrement surélevée par rapport au coude.

#### Précautions d'emploi

- L'écharpe doit être mise en place par un membre du personnel soignant habitué à traiter l'affection pour laquelle elle a été prescrite. Ce professionnel a la responsabilité de donner des conseils au patient et aux personnes qui l'assistent.
- En cas de gonflement anormal, de décoloration anormale de la peau ou de gêne inhabituelle, interrompre l'utilisation de l'écharpe et consulter un médecin.

#### Particularités d'utilisation

- Veiller à ce que les plaies recouvertes par l'écharpe soient protégées par un pansement adapté.
- Veiller à ne pas trop serrer l'écharpe pour ne pas entraver la circulation.

#### Accessoires associés

Immobilisation plâtrée ou résine.

#### Entretien

Fermer les attaches avant lavage. Lavable en machine (cycle délicat, température maximale de 40°C) ou à la main à l'aide d'un savon doux. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas utiliser de chlore. Laisser sécher à plat et à température ambiante. Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. S'assurer que l'écharpe est complètement sèche avant de l'utiliser de nouveau.

**INFORMATIONS REGLEMENTAIRES****Autorisation de marquage CE**

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

**Remboursement**

Conforme à la LPPR.

**Procédés de destruction**

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

<b>Distributeur</b>	<b>Fabricant légal</b>
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matéiovigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485