
	Marque :	
	Classe CE :	I, non stérile
	Durée de vie :	3 ans
	Année de mise sur le marché :	2002 en France
	Code CLADIMED :	M50CC02
	Code CND :	/
	Code GMDN :	41039
	Version :	E
	Date :	25/05/2021

DONNEES PRODUIT

Description

Collier cervical de type C1 en mousse.

Caractéristiques

- Collier cervical composé d'une mousse de forme anatomique recouverte de jersey coton non traumatisant et d'une fermeture auto-agrippante.
- Les colliers cervicaux Actimove® Cervical sont disponibles en deux densités, semi-ferme et ferme, adaptés à un maintien plus ou moins fort de la région cervicale ainsi qu'en plusieurs tailles.
- Formule sans latex, sans phtalates.

Composition

Coton (jersey), polyuréthane (mousse, densité 24 ou 31 kg/m³), polyamide (attache).

Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

Conditionnement / Stérilisation

Présentation unitaire avec notice d'utilisation. Les mesures correspondent à la hauteur et à la circonférence du cou. Pour le confort et l'hygiène du patient, une enveloppe supplémentaire en jersey coton est livré avec le collier cervical. Produit livré non stérile.

Références

Présentations sans vignette de remboursement - [Mousse semi ferme](#)

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur cou	Circonférence cou	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809016062	72819-25	72819-25	XS	6,5 cm	26 – 33 cm	1	60	
4042809016093	72819-26	72819-26	S	7,5 cm	30 – 36 cm	1	60	
4042809016123	72819-27	72819-27	M	9 cm	33 – 39 cm	1	60	
4042809016154	72819-28	72819-28	L	10 cm	36 – 42 cm	1	40	
4042809016185	72819-29	72819-29	XL	11 cm	39 – 45 cm	1	40	
4042809016215	72819-30	72819-30	XL-Court	7 cm	38 – 48 cm	1	50	

Présentations sans vignette de remboursement - **Mousse ferme**

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur cou	Circonférence cou	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809016246	72819-31	72819-31	XS	6,5 cm	26 – 33 cm	1	60	
4042809016277	72819-32	72819-32	S	7,5 cm	30 – 36 cm	1	60	
4042809016307	72819-33	72819-33	M	9 cm	33 – 39 cm	1	40	
4042809016338	72819-34	72819-34	L	10 cm	36 – 42 cm	1	40	
4042809016369	72819-35	72819-35	XL-Court	7 cm	38 – 48 cm	1	50	

Présentations avec vignette de remboursement - **Mousse semi ferme**

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur cou	Circonférence cou	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809016062	73421-02	72819-25	XS	6,5 cm	26 – 33 cm	1	60	7140260
4042809016093	73421-03	72819-26	S	7,5 cm	30 – 36 cm	1	60	7140260
4042809016123	73421-04	72819-27	M	9 cm	33 – 39 cm	1	60	7140260
4042809016154	73421-05	72819-28	L	10 cm	36 – 42 cm	1	40	7140260
4042809016185	73421-06	72819-29	XL	11 cm	39 – 45 cm	1	40	7140260
4042809016215	73421-07	72819-30	XL-Court	7 cm	38 – 48 cm	1	50	7140260

Présentations avec vignette de remboursement - **Mousse ferme**

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur cou	Circonférence cou	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809016246	73421-08	72819-31	XS	6,5 cm	26 – 33 cm	1	60	7140260
4042809016277	73421-09	72819-32	S	7,5 cm	30 – 36 cm	1	60	7140260
4042809016307	73421-10	72819-33	M	9 cm	33 – 39 cm	1	40	7140260
4042809016338	73421-11	72819-34	L	10 cm	36 – 42 cm	1	40	7140260
4042809016369	73421-12	72819-35	XL-Court	7 cm	38 – 48 cm	1	50	7140260

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

Indications

Syndrome cervical douloureux, aigu ou chronique (arthrose cervicale, torticolis, entorse cervicale bénigne...).

Contre-indications

Aucune connue.

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Le collier cervical Actimove® Cervical préformé est destiné à épouser les contours du cou.

- 1- Placer le collier devant le cou et faire reposer le menton dans la découpe prévue à cet effet.
- 2- Enrouler le collier autour du cou et fermer à l'aide de l'attache auto-agrippante.

Précautions d'emploi

- Mise en place initiale par un professionnel de santé ou personnel formé.
- Mesurer la hauteur et la circonférence du cou afin de choisir le collier cervical adapté et éviter toute tension excessive.
- Ne pas trop serrer le collier afin de ne pas entraver la respiration.

Particularités d'utilisation

- En cas de décoloration de la peau, d'hyperhydrose ou d'un sentiment d'inconfort, enlever le collier cervical et consulter votre médecin.
- Veiller à ce que les plaies recouvertes par le collier cervical soient protégées par un pansement approprié.

Accessoires associés

Actimove® Physiopack®, poche pour application de froid et/ou de chaleur peut être utilisée en complément.

Entretien

Fermer l'attache auto-agrippante. Laver en machine à 30°C (cycle délicat) ou à la main, à l'eau tiède à l'aide d'un savon doux. Rincer abondamment. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas nettoyer à sec. Laisser sécher à température ambiante. Ne pas repasser. Ne pas utiliser de sèche-linge. S'assurer que le collier est complètement sec avant de l'utiliser de nouveau.

L'enveloppe en jersey amovible permet un nettoyage plus fréquent.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Conforme à la LPPR.

Procédés de destruction

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matériorvigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485