

PROTOCOLE D'UTILISATION

FILTRANIOS 31 DS - Tous germes

1 - MISE EN PLACE DU FILTRE

**PURGER
LE
FLEXIBLE**



1 Indiquer les dates de début et de fin d'utilisation du filtre sur l'étiquette du sachet et la coller sur le cahier de traçabilité.



2 Ouvrir le sachet stérile.



3 Adapter le filtre sur le flexible.



4 Placer le filtre sur le support et éliminer le sachet.



5 Indiquer à nouveau les dates de début et de fin d'utilisation sur l'étiquette du filtre.



6 Ôter l'opercule pelable en tirant sur la languette.



7 Le filtre ainsi installé peut être utilisé pendant 31 jours.

**Ne jamais poser la douchette en dehors de son support.
Eviter de poser la main sur la jupe de protection du filtre.
Ne pas nettoyer le filtre.
Ne pas ôter le filtre pendant la période des 31 jours.
Changer impérativement le filtre au 31ème jour d'utilisation.**

2 - UTILISATION DU SYSTEME TIMESTRIP



START

CHECK

1ère utilisation



Fixer le support du TIMESTRIP à l'entrée de la cabine de douche.
Attention : le TIMESTRIP ne doit pas être au contact de l'eau.

Lors de la pose du filtre



Placer le TIMESTRIP dans le compartiment.



Ecraser le bouton START du TIMESTRIP pour déclencher le timer.



Lorsque l'indicateur du TIMESTRIP est totalement rouge, vérifier la date et changer le filtre.