

Opaque
Transparent
Brûlures
Ovale
Plaque Mousse
Contour



23313268 v3.0a Le logo Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S.
© [2012-08] Tous droits réservés à Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danemark.

Avertissement

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation de ce produit peut entraîner un risque potentiel pour l'utilisateur, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les caractéristiques du produit et créer un risque supplémentaire de toxicité ou d'infection pour le patient.

Attention

L'utilisation des pansements Comfeel chez les patients souffrant d'infection locale et/ou systémique est laissée à la libre appréciation des professionnels de santé.

Les plaies diabétiques (surtout dans la partie inférieure de la jambe et au niveau du pied) ainsi que les plaies dues uniquement ou principalement à une insuffisance artérielle doivent être étroitement surveillées par un professionnel de santé en fonction du contexte clinique.

En cas de réactions allergiques, contacter Coloplast.

Comfeel Plus Plaque Mousse ne doit pas être utilisé si la plaie est très profonde et cavitaire.

Conserver en position horizontale à température ambiante.

Éviter l'exposition directe du produit au soleil.

Comfeel Plus est stérilisé par radiations.

Usage unique

Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité avant usage. Ne pas re-stériliser.

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ses produits dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.

Indications

Les pansements Comfeel Plus sont indiqués dans le traitement des ulcères de jambe et des escarres faiblement à modérément exsudatifs.

Comfeel Plus Transparent et Comfeel Plus Brûlures peuvent également être utilisés pour les brûlures superficielles (1er et 2eme degrés), sites donneurs de greffes, les abrasions et les plaies post-opératoires.

Comfeel Plus Plaque Mousse est indiqué dans le traitement et la prévention des escarres.

Le pansement Comfeel Plus Contour convient particulièrement aux escarres situées sur des zones mobiles ou en relief. Il offre une zone de maintien plus large et sera donc préféré sur des plaies difficiles à appareiller.

Le pansement Comfeel Ovale est recommandé sur les psoriasis traités par un dermocorticoïde.

Information

Les pansements Comfeel créent un environnement humide, optimal pour la cicatrisation des plaies.

La gamme Comfeel comprend différents pansements : Comfeel Plus Transparent, Comfeel Plus Contour, Comfeel Plus Opaque, Comfeel Ovale, Comfeel Plus Plaque Mousse; Comfeel Plus Brûlures.

Utilisation de Comfeel Plus



Comfeel Plus Transparent, Comfeel Plus Opaque, Comfeel Plus Contour, Comfeel Plus Ovale, Comfeel Plus Brûlures

1. Choisir un pansement dont la taille dépasse d'environ 1 cm le pourtour de la plaie.
2. Retirer le papier protecteur imprimé.
3. Appliquer la face adhésive du pansement sur la plaie.
4. Enlever ensuite la feuille protectrice transparente.



Comfeel Plus Plaque Mousse

1. Enlever les parties de mousse centrales sur une surface au moins égale à la surface de la plaie.
2. Retirer le papier protecteur.
3. Appliquer la face adhésive du pansement sur la plaie en faisant correspondre le centre du pansement avec le centre de la plaie.
4. Enlever ensuite le papier protecteur périphérique.



Comfeel Plus Contour

Pour le Comfeel Plus Contour, procéder comme décrit précédemment en appliquant les parties latérales du pansement sans les étirer.

Nettoyer la plaie au serum physiologique puis sécher délicatement la zone périlésionnelle.

Comfeel Plus absorbe les exsudats et se transforme en gel. Lorsque le pansement est saturé, une vésicule transparente apparaît. Le pansement doit être changé lorsque la vésicule atteint l'un des bords du pansement.

Si vous utilisez le pansement Comfeel Plus Plaque Mousse, contrôlez l'épaisseur de la mousse à intervalles réguliers. Comfeel Plus Plaque mousse doit être changé lorsque l'épaisseur initiale de la mousse a diminué de moitié.

En cas de fuite, le pansement doit être changé immédiatement.

Au moment du retrait des pansements de la gamme Comfeel, une odeur désagréable peut se dégager. Ce phénomène est normal et disparaît en nettoyant la plaie.

Renouvellement du pansement :

- détertion : tous les 2 à 3 jours
- bourgeonnement, épidermisation : tous les 3 à 7 jours
- psoriasis : tous les 5 à 7 jours.

Les pansements Comfeel sont perméables à l'air mais imperméables à l'eau. Ils mettent la plaie à l'abri des germes, des chocs et des frottements, la protégeant ainsi tout au long du processus de cicatrisation.

Divers

Le N° WO indiqué sur la boîte identifie un lot de conditionnement. Le N° LOT qui apparaît sur le sachet unitaire (conditionnement primaire) correspond à un lot de production.

WO