



Mepilex® Border Protect
Sacrum




Mepilex® Border Protect
Talon



Pansement **hydrocellulaire** siliconé bordé

Plaies exsudatives


- Région du sacrum : escarres sacrées, kystes pilonidaux
- Région du talon : escarres, ulcères

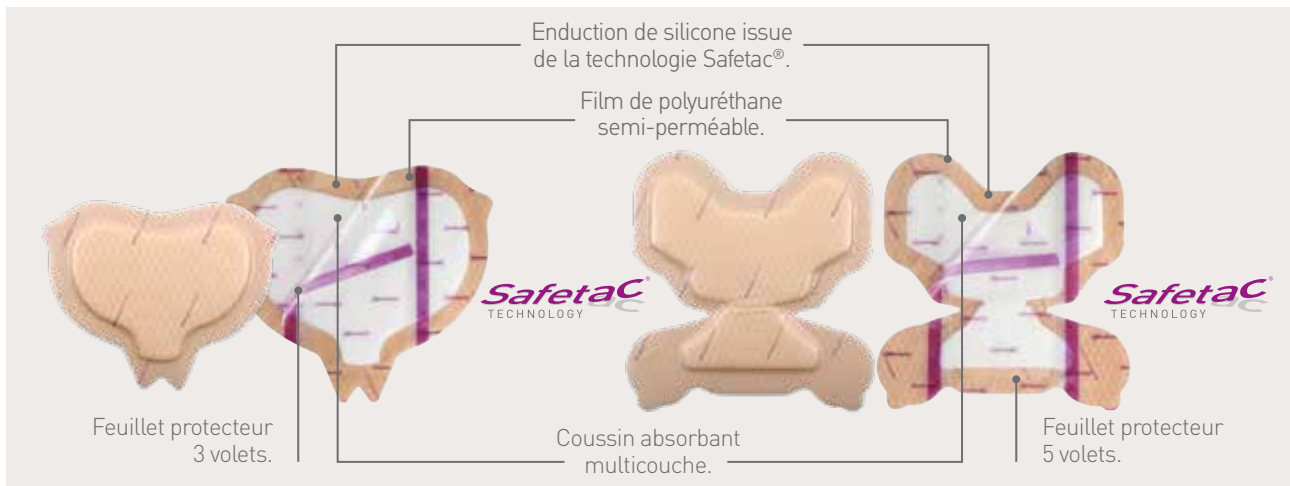


Propriétés

- **Capacité élevée d'absorption et de rétention.**
- **Bordure renforcée pour éviter que la bordure ne roule en cas de friction.**
- **Retrait et positionnement facilités grâce aux ailettes de préhension.**
- Pose facilitée grâce au feuillet protecteur en 3 ou 5 volets.
- Souplesse et conformabilité.
- Retrait atraumatique et indolore.
- Autorise la douche.
- Film externe formant une barrière anti-microbienne, (micro-organismes > 25 nm).


Mode d'emploi

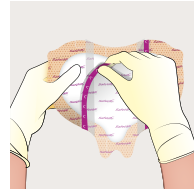


Nettoyer la plaie. Sécher soigneusement le pourtour. Retirer le feuillet protecteur au centre du pansement.

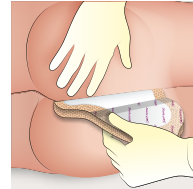


Appliquer la face adhérente sur la plaie, **sans étirer le pansement.**

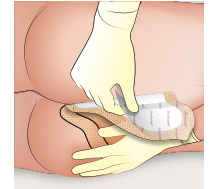

Retirer les feuillets protecteurs latéraux successivement. **Poser et lisser les bords sur la peau.**

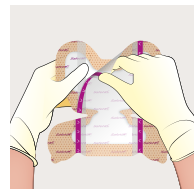

Nettoyer la plaie. Sécher soigneusement le pourtour. Retirer le grand feuillet protecteur central.

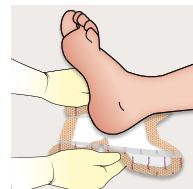

Appliquer la face adhérente sur la plaie. Retirer les 2 grands feuillets latéraux, **poser sans étirer le pansement.**



Retirer les 2 petits feuillets latéraux, **poser et lisser les bords sur la peau.**

Codes LABO	Codes ACL 7	Code ACL 13	Désignation Produit	Conditionnement	
				Pièces/boîte	Boîtes/carton
282 040	6 219 303	7323 190 244 676	Mepilex® Border Protect Sacrum 16 x 20 cm	10	5
			NOUVELLE TAILLE		
282 440	6 110 880	7 323 190 218 189	Mepilex® Border Protect Sacrum 22 x 25 cm	10	3
282 720	6 110 881	7 323 190 218 196	Mepilex® Border Protect Talon 22 x 23 cm	10	3

* Pansements inscrits sur la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR) par la Sécurité Sociale.

Mölnlycke, Mepilex et SafetaC sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Ces produits sont fabriqués en Europe. Dispositifs médicaux. CE 2797. L'organisme notifié de l'ensemble de ces produits est BSI (British Standards Institution).

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la notice d'utilisation accompagnant les produits.

Mepilex® Border Protect Talon, Mepilex® Border Protect Sacrum : Remboursement LPPR, catégorie pansements hydrocellulaires anatomiques à absorption importante, adhésifs, stériles. La prise en charge est assurée pour les plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel. Prix LPPR = Prix limite de vente. Classe IIb.

Reclamation qualité produits : reclamation.qualite@molnlycke.com

Service clients & Renseignements produits : Tel : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46.

Distributeur : Mölnlycke Health Care - CS 70205 - 13 allée du Chateau Blanc - 59445 Wasquehal cedex.

Fabricant : Mölnlycke Health Care - Box 13080, SE-402 52 Goteborg, Sweden - Tel : +46 31 722 30 00 - Fax : +46 31 722 34 01

www.molnlycke.fr - © Copyright (2019) Mölnlycke Health Care.