

SURFANIOS

SURFANIOS CITRON

Détergent désinfectant
sols et surfaces

PRODUIT
A DILUER
soit 20 ml → 8 L




0,25%



INDICATIONS


Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical.

PROTOCOLE D'UTILISATION

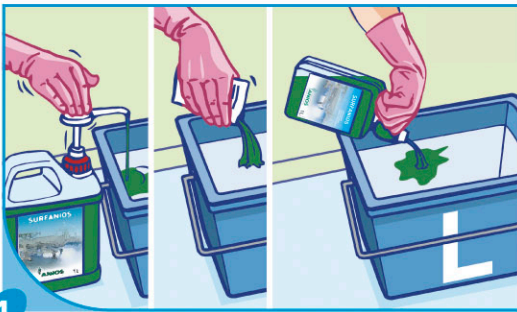


1

Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau.
Dilution à 0,25 % : verser une dose de 20 ml de SURFANIOS.

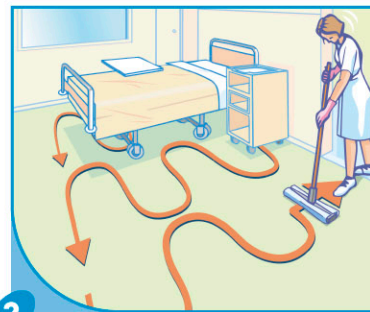

2

Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie, du plus propre au plus sale. Ne pas rincer.

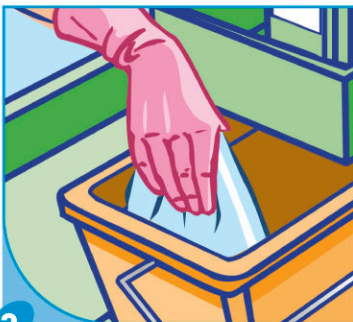

3

Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet.



4

Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.

Fréquence d'utilisation	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
SURFANIOS							

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations).
Produit biocide. Utilisez avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Stockage : entre +5°C et +35°C.