

**Désignation** **GARROT SYNTHETIQUE SANS LATEX ré-utilisable non stérile**

*Designation* *Non sterile, re-usable LATEX FREE SYNTHETIC TOURNIQUET*

**Référence / Reference** **GAR-03**

**Destination/utilisation** **Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour les examens médicaux et chirurgicaux.**

*Destination/use* *Medical device used during blood sampling, for medical and surgical examinations*

<b>Composition</b>	<b>SANS LATEX</b>
<i>Composition</i>	<i>Matière synthétique</i>
	<i>LATEX FREE</i>
	<i>Synthetic raw material</i>

**Caractéristiques**

**Couleur : bleu**  
**Surface texturée**  
**Lavable en machine**  
**Dimensions**  
**Longueur : 75 cm (± 3 cm)**  
**Largeur : 25 mm (± 3 mm)**  
**Épaisseur : 0,5 mm (± 0,05 mm)**

*Characteristics*

*Colour : blue*  
*Textured surface*  
*Machinewashable*  
*Dimensions*  
*Length: 75 cm (± 3 cm)*  
*Width: 25 mm (± 3 mm)*  
*Thickness: 0,5 mm (± 0,05 mm)*

**Conformité** **Directive Européenne 93/42/CE - Classe : I**

*Conformity* *European Directive 93/42/EC - Class: I*

**Durée de vie** **2 ans**

*Shelf life* *2 years*

<b>Stérilisation</b>	<b>Les garrots peuvent être stérilisés à la vapeur sous sachet pelable adapté à ce type de stérilisation ou en boîte inox</b>
<i>Sterilization</i>	<i>Tourniquets can be sterilized by steam sterilization with peelable pouches or inox box</i>
<b>Paramètres de stérilisation</b>	<b>121°C - 15 minutes =&gt; le produit peut être stérilisé jusqu'à 5 fois</b>
<i>Sterilization parameters</i>	<b>134°C - 18 minutes =&gt; le produit peut être stérilisé 3 ou 4 fois</b>
	<i>121°C - 15 minutes =&gt; product can be sterilized till 5 times</i>
	<i>134°C - 18 minutes =&gt; product can be sterilized 3 or 4 times</i>

**Emballage** **Boîte de 30 garrots**

*Ppacking* *Box of 30 tourniquets*

**Conditionnement** **Carton de 4 boîtes**

*Packaging* *Carton of 4 boxes*

**Fabrication** **L.C.H. France : certifiée ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003**

*Manufacturing* *LCH France : registered ISO 9001 : 2008 and ISO 13485 : 2003*