



Classe CE : I, non stérile

Durée de vie : 5 ans

Année de mise sur le marché : 1984 en France

Code CLADIMED : F51DA02

Code GMDN : 34864

Version D
03/07/2017

DONNEES PRODUIT

Description

Bande adhésive constituée d'un support non-tissé multi-extensible, enduit sur une seule face d'une masse adhésive acrylique, en vue d'adhérer sur la peau par simple pression. Un élément protecteur imprimé quadrillé avec une prédécoupe centrale protège la partie adhésive.

Caractéristiques

- Masse adhésive haute tolérance cutanée,
- Support non-tissé multi-extensible, extrêmement conformable, facilitant la pose au niveau des zones à forte mobilité (articulations),
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau, ce qui réduit le risque de macération,
- Retrait indolore, idéal pour les peaux sensibles,
- Radiotransparent,
- Formule sans latex, sans phtalates (DEHP).

Composition

<i>Support</i>	Non- tissé, extensible, 100% polyester sans liant. Couleur : blanc. Grammage moyen : 37 - 54 g/m ² .
<i>Masse adhésive</i>	Copolymères acryliques. Grammage moyen : 30 - 36 g/m ² .
<i>Elément protecteur</i>	Papier siliconé prédécoupé, imprimé avec quadrillage.

Contrôles des matières premières et des produits finis

Matières premières

Support	masse surfacique, épaisseur.
Masse adhésive	identification par spectrométrie IR, viscosité, extrait sec.
Elément protecteur	masse surfacique, épaisseur, siliconage.

Produits finis

Contrôle quantitatif et qualitatif de la masse adhésive.
Contrôle de l'adhésivité sur acier par pelage.

Conditionnement / Stérilisation

Boîte carton individuelle. Produit livré non stérile.

Références

Présentation sans vignette de remboursement

Code EAN13	Code produit	Dimension	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809000672	71443-00	10 m x 2,5 cm	24	24	
4042809000702	71443-01	10 m x 5 cm	24	24	
4042809000733	71443-02	10 m x 10 cm	12	24	
4042809000764	71443-03	10 m x 15 cm	12	24	
4042809000795	71443-04	10 m x 20 cm	6	24	
4042809000825	71443-05	10 m x 30 cm	6	24	

Présentation avec vignette de remboursement

Code EAN13	Code produit	Dimension	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809001037	71940-00	2 m x 10 cm	12	12	1326040
4042809000580	71442-00	5 m x 2,5 cm	12	24	1326040
4042809000610	71442-01	5 m x 5 cm	12	24	1301650
4042809000641	71442-02	5 m x 10 cm	12	12	1307226
4042809000856	71444-00	10 m x 2,5 cm	6	24	1301650
4042809000887	71444-01	10 m x 5 cm	12	24	1307226
4042809000917	71444-02	10 m x 10 cm	12	24	1321924
4042809000948	71444-03	10 m x 15 cm	6	24	1321924
4042809000979	71444-04	10 m x 20 cm	6	24	1321924

Conditions de stockage

Conserver dans un endroit sec et frais (<25°C), à l'abri de la lumière.

INDICATIONS / CONTRE-INDICATIONS

Indications

Toutes les indications des sparadraps en grande largeur (pansements de grandes dimensions en post-opératoire) sur sujets allergiques aux sparadraps de masse adhésive traditionnelle, Fixation de drains et de cathéters.

Contre-indications

Intolérance aux masses adhésives acryliques

CONSEILS D'UTILISATION

Mode d'emploi

Se conformer aux informations disponibles sur l'emballage.

Pour décoller l'élément protecteur, plier au niveau de la prédécoupe du protecteur, puis effectuer une légère traction transversale pour permettre une séparation aisée de la bande adhésive.

Précautions d'emploi

- Ne pas exercer de tension lors de la pose du pansement : risque d'apparition de phlyctènes (décollement de l'épiderme), risque accentué en particulier par la présence de réactions inflammatoires ou œdémateuses, après intervention chirurgicale.
- Eviter l'emploi d'ammoniums quaternaires avant pose du dispositif.

Particularité d'utilisation

Doit être appliqué sur peau sèche et propre.

Accessoires associés

Pansements, drains, cathéters.

Entretien

Usage unique.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

Remboursement

Conforme à la LPPR.

Procédés de destruction

Procédés prévus pour la destruction des déchets de soins (incinération contrôlée...) ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur

BSN-RADIANTE SAS
57 Boulevard Demorieux
F-72000 LE MANS
Service Clients : 02 43 83 40 40
Matériorvigilance : 02 43 83 24 97
Fax : 02 43 83 40 41
Site certifié ISO 9001, 13485 & 14001

Fabricant légal

BSN Medical GmbH
Quickbornstrasse, 24
D-20253 HAMBURG
Allemagne
Site certifié ISO 9001 & 13485