

ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70% vol STERIDIS

Pour usage médical

Conditionnement

Bidon de 2 Litres
Carton de 6 bidons

Composition

ALCOOL ISOPROPYLIQUE (grade pharmaceutique).

Mode d'emploi

Lever le clapet présent sur le capot et verser la quantité de liquide souhaité dans le flacon de 500ml ou sur une compresse.

Passer ensuite cette compresse sur la surface à traiter.

Bien refermer le clapet après utilisation.

Précautions d'emploi

Eviter le contact avec une peau irritée, une plaie ou les muqueuses. Conserver hors de portée des enfants.



Code article : ISO2000 - Formule STAIH2

Fiche Technique. Version 2- 11/2011

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON
Tél : 0033 (0) 3 22 09 41 39 - Fax : 0033 (0) 3 22 50 01 34 - mail : contact@steridis.com