

FICHE TECHNIQUE

3M™ Durapore™

Sparadrap tissé hypoallergénique

Marquage CE: Classe I non stérile selon la directive 93/42

I - Indications

Le sparadrap 3M Durapore permet de fixer avec sécurité les pansements volumineux, les immobilisations, ou les sondes et appareils soumis à des conditions difficiles (mouvements...) tels les sondes naso-gastriques ou les cathéters péri-duraux.

II - Caractéristiques du produit

Ce sparadrap hypoallergénique tissé, d'aspect soyeux, résistant, est facile à découper dans les deux sens avec les doigts. C'est celui qui a la plus rapide et la plus forte adhérence des sparadraps 3M.

Il ne laisse pas de résidus sur le matériel.

Sa souplesse latérale lui permet de suivre les mouvements, mais il ne doit pas être fixé en tension, étant peu extensible.

- **Composition:** *Ne contient pas de latex*

- Support : fibres de rayonne tissées.
- Adhésif : Copolymère d'acrylate hypoallergénique, sensible à la pression.

- **Caractéristiques physiques:**

- Adhésivité à la peau : T 0 : 18 g/cm
T 48h : 77 g/cm
- Charge minimale de rupture : 6800 g/cm
- Elongation (à la rupture) : 15 %
- M.V.T.R. : 525 g/m²/24h

- **Tests de biocompatibilité:**

- Cytotoxicité minimale
- Test de Draize : très peu irritant.
- Irritation cumulative : pas d'effets néfastes

- **Date d'expiration du produit et conservation:**

- 5 ans dans des conditions de stockage normales soit une température moyenne de 10°C à 30°C, avec 30 à 60% HR.



3M France - Marchés de la Santé
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
N° Azur : 0 810 331 300 - Fax : 01.30.31.85.51

- **Mode de stérilisation possible:**

- Stérilisation possible à l'oxyde d'éthylène à 55°C, 1 h minimum.

- **Élimination des déchets:**

- Incinération

- **Lieu de fabrication:**

- 3M Deutschland GmbH/Werk Kamen, Edisonstrasse 6, D59157, Kamen, Allemagne.
- 3M Poland Sp. Z.o.o. Site Wroclaw ul. Kwizyńska 6 – 51416 Wroclaw. POLAND

III - Présentations commerciales :

- **Hôpital**

Code	Références	Dimensions (m x cm)	Rouleaux/Boîte	Gabarit
DUR 12	1538-0	9,14 x 1,25	24	10
DUR 25	1538-1	9,14 x 2,50	12	10
DUR 50	1538-2	9,14 x 5,00	6	10
DUR 75	1538-3	9,14 x 7,50	4	10
DUR 512*	1538-0S	5,00 x 1,25	32	10
DUR 525*	1538-1S	5,00 x 2,50	20	10
DUR 550*	15382S	5,00 x 5,00	12	10
DURDEV 25		5,00 x 2,50	48	1

**avec flasque*

- **Ville**

Référence	Code ACL	Code EAN 13	Code LPPR	Dimensions (m x cm)	Rouleaux/Boîte
1538B	707830.1	4046719318810	1354591	5,00 x 2,50 - Dévidoir	12

Admis à la LPPR