

# Thermomètre Tympanique Genius™ 3

## Guide rapide utilisateur

### Prendre une température



Inspecter l'anatomie du conduit auditif afin de noter la direction générale du conduit. S'assurer qu'il est propre et sec. Pas de présence de sang ou de fluide.



Retirer le thermomètre de sa base en saisissant la poignée et en le soulevant de la base.



Vérifier la lentille à l'extrémité de la sonde du thermomètre. Celle-ci doit être propre et exempte de tout débris. Si elle est sale, la nettoyer en suivant le guide de nettoyage.



Pousser fermement l'extrémité de la sonde dans un nouveau couvre-sonde jusqu'à entendre un clip. Vérifier l'intégrité du couvre-sonde afin de s'assurer de l'absence de trou ou de déchirure dans le film plastique.



S'assurer que le couvre-sonde est correctement placé sur l'extrémité de la sonde. Aucune partie de l'extrémité de la sonde métallique ne doit être visible lorsque le couvre-sonde est en place.



Introduire doucement l'extrémité de la sonde muni de son couvre-sonde, en suivant la direction du conduit auditif. Presser immédiatement le bouton triangulaire SCAN. Un triple BIP retentit quand la mesure est terminée.



Appuyer sur le bouton EJECT pour détacher le couvre-sonde sans le toucher et le jeter dans un conteneur à déchets.



Remettre le thermomètre sur sa base pour stockage. L'appareil se met en mode veille après 10 secondes d'inactivité, l'écran LCD s'éteint.



Pour rappeler la dernière température prise, appuyer sur le bouton SCAN et relâcher, la dernière température prise apparaîtra. Si un nouveau couvre-sonde est mis en place, la mémoire sera vidée.

### Fonctions optionnelles

Utiliser **SEULEMENT** les méthodes approuvées de nettoyage explicitées dans le manuel de l'utilisateur.



Pour utiliser le chronomètre de 60 secondes, appuyer et maintenir l'icône horloge pendant 2 secondes pour l'activer.



Appuyer une fois sur l'icône horloge pour commencer. Des BIP retentiront toutes les 15 secondes. Le thermomètre s'éteindra automatiquement au bout des 60 secondes. Pour désactiver le mode chronomètre, appuyer une fois sur l'icône horloge.

#### A DESTINATION DES MÉDECINS ET INFIRMIÈRES

Le thermomètre auriculaire Genius™ 3 avec base est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Covidien, CE 0123. Genius™ 3 avec base permet de prendre la température des patients. Le thermomètre tympanique Genius™ 3 est un thermomètre auriculaire avec des couvre-sondes jetables à usage unique. Lire attentivement la notice du dispositif avant toute utilisation.

**IMPORTANT :** veuillez-vous reporter à la notice des produits pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.