

Conseils de pose du pansement hydrocellulaire **AQUACEL™ Foam***

NOUVEAU **AQUACEL™**
Foam



Pansement hydrocellulaire

Application du pansement :

AQUACEL™ foam peut être utilisé en première intention pour les plaies chroniques et aiguës.

1 S'assurer que la peau péri-lésionnelle soit propre et sèche. Choisir une taille de pansement adaptée ; la zone absorbante doit dépasser d'1 cm sur les pourtours de la plaie.

Le pansement peut être coupé si besoin.
Version adhésive : si l'adhésif du pansement est coupé, un adhésif supplémentaire peut être nécessaire pour maintenir le pansement en place.
Version non adhésive : une bande, un filet ou tout autre fixation est nécessaire pour maintenir le pansement.

2 Sortir le pansement de son emballage stérile.



3 Retirer la pellicule protectrice (version adhésive).



4 Placer le pansement sur la plaie en faisant coïncider le centre de la zone absorbante avec le centre de la plaie.
Version adhésive : lisser les bords du pansement.



Version non adhésive : une bande, un filet ou tout autre fixation est nécessaire pour maintenir le pansement.



Application sur des zones anatomiques :

Pour des localisations anatomiques, telles que le sacrum ou le talon, des formes adhésives adaptées sont disponibles.

Pansement sacrum - 20 cm x 16,9 cm



Enlever la pellicule protectrice. Maintenir le pansement par les bords. Plier le pansement en deux en faisant se toucher les bords opposés de la couche externe. Placer le pli du pansement dans le pli fessier.



Appliquer le pansement et lisser ses bords.



Pansement talon/multisite - 19,8 cm x 14 cm



Enlever la pellicule protectrice. Faire coïncider le haut du pansement avec l'arrière du talon et le maintenir en place avec l'adhésif.



Replier le pansement de l'arrière du talon vers le dessous du pied.



Autres applications - Coude, doigt/orteil



Découpable



Retrait :

Le pansement doit être changé selon l'état de la plaie, et peut rester en place jusqu'à 7 jours.



Pour retirer le pansement, soulever délicatement un bord du pansement. Faire de même jusqu'à ce que tous les bords soient décollés.



AQUACEL™ foam - Pansements hydrocellulaires pour toutes les plaies

Remboursement LPPR Sécurité Sociale**

Version non-adhésive

Code ICC	Taille du pansement	Boîtage
420186	12,5 cm x 12,5 cm	16
420188	17,5 cm x 17,5 cm	10
420663	15 cm x 20 cm	10
420662	20 cm x 20 cm	10

Remboursement LPPR Sécurité Sociale**

Formes adhésives anatomiques

Code ICC	Taille du pansement	Taille de la zone absorbante	Boîtage
420655	19,8 cm x 14 cm (Talon/Multisite)	14 cm x 8,7 cm	10
420656	20 cm x 16,9 cm (Sacrum)	11,4 cm x 13,5 cm	10

Remboursement LPPR Sécurité Sociale**

Version adhésive

Code ICC	Taille du pansement	Taille de la zone absorbante	Boîtage
420620	12,5 cm x 12,5 cm	8,5 cm x 8,5 cm	16
420621	17,5 cm x 17,5 cm	13,5 cm x 13,5 cm	10
420653	21 cm x 21 cm	17x17 cm	10

Comment prescrire ?

Dr Isabelle Dupont
1 rue de la Paix
75012 Paris

NON SUBSTITUABLE

Le 08/10/2012

M. Paul Legrand
64 ans

AQUACEL™
Foam

IMPORTANT :
Bien préciser « foam »

1 boîte de 16 pansements adhésifs 12,5x12,5 cm
Pour le nettoyage de la plaie :
1 spray de sérum physiologique stérile

IRRICLENS®

*Pour un mode d'emploi complet, se référer à la notice d'utilisation.

** Plaies aiguës sans distinction de phase, plaies chroniques en phase de bourgeonnement en traitement séquentiel.

AQUACEL™ foam est un dispositif médical de classe IIb (BSI)

Pour en savoir plus, contactez-nous au :
0800 35 84 80 (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine)

ConvaTec