

ANIOS SPS Premium

Détergent
détartrant
désinfectant
sanitaires



- **Formulation Aniosafe:** sur base acide lactique et acide glycolique
- **Produit non corrosif :** Formulé sans acide fort
- **Haut pouvoir détartrant**
- **Large spectre antimicrobien**
- **Action simultanée de nettoyage détartrage et désinfection**
- **Produit prêt à l'emploi**

INDICATIONS

Nettoyage, détartrage et désinfection des sanitaires, de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques.

CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide bleu.
- pH du produit \approx 2

Dès
5 min

PRODUIT PRET
A L'EMPLOI



ANIOS SPS Premium

Détergent, détartrant, désinfectant sanitaires

MODE D'EMPLOI



1 Produit prêt à l'emploi. Appliquer sur les surfaces à nettoyer.



2 Laisser agir 5 minutes minimum. Frotter si nécessaire.



3 Rincer. Laisser sécher.

COMPOSITION

- Chlorure de didécylidiméthylammonium (1,5 mg/g),
- Acide lactique (26,4 mg/g) / Acide Glycolique (21,0 mg/g)
- Excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage : entre +5°C et +35°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP 2) - usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENT

12 flacons de 750 ml
avec pulvérisateur mousseur.....Réf. 2201.515

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 13697, EN 1276, EN 13727, EN 13697	5 minutes
Levures	EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 13697	15 minutes
Moisissures	EN 1275, EN 13697	15 minutes
	EN13624	60 minutes
Virus	Selon EN 14476 : BVDV (virus modèle HCV) PRV (virus modèle HBV)	5 minutes

