

PROTOCOLE D'UTILISATION FILTRANIOS 31 DA

1 - MISE EN PLACE DU FILTRE



1 Indiquer les dates de début et de fin d'utilisation du filtre sur l'étiquette du sachet et la coller sur le cahier de traçabilité.



2 Ouvrir le sachet stérile.



3 Indiquer à nouveau les dates de début et de fin d'utilisation sur l'étiquette du filtre.



4 Adapter le filtre sur le raccord rapide et éliminer le sachet.



5 Ôter l'opercule pelable en tirant sur la languette.



6 Le filtre ainsi installé peut être utilisé pendant 31 jours.



**Eviter de poser la main sur la jupe de protection du filtre.
Ne pas nettoyer le filtre.
Ne pas ôter le filtre pendant la période des 31 jours.
Changer impérativement le filtre au 31ème jour d'utilisation.**

2 - UTILISATION DU SYSTEME TIMESTRIP



START

CHECK

1ère utilisation



Fixer le support du TIMESTRIP à proximité du point d'utilisation.
Attention : le TIMESTRIP ne doit pas être au contact de l'eau.

Lors de la pose du filtre



Placer le TIMESTRIP dans le compartiment.



Ecraser le bouton START du TIMESTRIP pour déclencher le timer.



Lorsque l'indicateur du TIMESTRIP est totalement rouge, vérifier la date et changer le filtre.