



NOTICE D'UTILISATION & DE  
MONTAGE DU FAUTEUIL

**EOEOON**



INNOV SA

15 Rue Suzanne Bernard – Route de l'Aéroport de Barberey  
10600 BARBEREY SAINT SULPICE

 +33 3 25 29 40 00

[www.innov-sa.com](http://www.innov-sa.com)

# A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION

## I- NOTICE D'UTILISATION

### Conditions de stockage

Le 'COCOON' doit être stocké dans un local sec et tempéré en respectant le sens HAUT/BAS du carton.

### Condition d'utilisation

Ne pas faire fonctionner cet appareil sans avoir au préalable :

- été formé à un essai pratique avec le revendeur ou son installateur,
- Lu et compris ce manuel.

Veiller à laisser une distance suffisante (environ 60 cm) derrière le fauteuil pour éviter qu'il ne vienne en contact avec le mur lorsqu'il est en position 'Relax'.

S'assurer que l'emplacement du fauteuil soit une surface plane et sans déclivité pour valider la bonne stabilité du fauteuil au sol afin que votre fauteuil ne puisse pas glisser.

Ne pas placer le fauteuil à proximité d'une source de chaleur importante.

Brancher le câble alimentation sur un réseau électrique conforme aux normes en vigueur et en correspondance avec la tension du boîtier d'alimentation 230 V.

En cas de risque d'orages il est recommandé de ne pas utiliser le fauteuil.

Le fauteuil releveur ne doit pas se déplacer lors de son utilisation.

Nous vous conseillons de faire un cycle à vide afin de vous familiariser avec le fauteuil.

L'utilisateur doit interdire l'utilisation de ce fauteuil par les enfants.

Le repose-jambes n'est pas un siège supplémentaire.

Avant de déplacer le fauteuil : débrancher le câble d'alimentation.

N'utiliser que les pièces et accessoires d'origine distribués par INNOV' SA, permettant de garantir la sécurité et de maintenir la conformité du produit.

Il est interdit de modifier le fauteuil, au quel cas la garantie ne sera plus valable.

La mauvaise utilisation du fauteuil annulera également les conditions de garantie.

Ne pas exposer le produit en pleine lumière car cela peut entraîner la décoloration partielle des revêtements.

## **Présentation d'usage**

L'usage du fauteuil 'COCOON' n'est pas destiné à des personnes désorientées et pour les utilisateurs nécessitant, l'aide et la vigilance d'une tierce personne sont impératives.

## **Limite de poids**

Ce fauteuil releveur ne peut pas être utilisé par des personnes pesant plus de 160 kg.

## **2 – MONTAGE**

Sortir le fauteuil de son carton d'emballage.

Emboîter le dossier sur la base en suivant les 2 rails de coulissement métalliques, en fixant au parfait enclenchement des 2 parties, jusqu'au 'CLIC'.

Insérer chaque tige d'accoudoir droite et gauche dans l'orifice prévu à cet effet sur l'accotoir droit et gauche.


Brancher le transformateur au câble électrique du vérin.

Brancher le fil électrique sur le transformateur à l'autre extrémité. Vérifier que toutes les connexions électriques soient bien mises en place.

Brancher le câble d'alimentation sur un réseau électrique conforme aux normes en vigueur et en correspondance avec la tension d'alimentation 220 V.

## **Montage Porte-revue :**

- Ouvrir l'accoudoir,
- Insérer le porte-revue dans l'accotoir en faisant attention à ne pas gêner la fermeture de l'accoudoir (cf. photo)

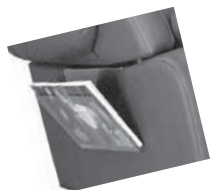

*Placer votre porte-revue  
au centre de l'accotoir  
afin de ne pas boucher  
l'encoche située à l'avant*



## **Montage Tablette :**

- Mettre le fauteuil 'COCOON' en position releveur,
- Insérer le support métallique de la tablette dans l'ouverture prévue à cet effet (cf. photo ci-dessous),
- Poser le plateau sur ce support.

**Si vous souhaitez changer la tablette de côté, ôter le bouchon noir obstruant l'ouverture et installer votre support de tablette.**



*Ouverture pour  
installation du  
support de tablette*




## Utilisation de la télécommande

Télécommande sécurisée et réversible

- Chute de celle-ci impossible grâce à son placement sous le coussin d'accoudoir.
- Fonction 'Stop & Start' : Arrêt automatique en position 'Assis'.
- Appuyer à nouveau sur le même bouton pour passer en position 'Releveur'.

Inclinaison vers  
l'arrière

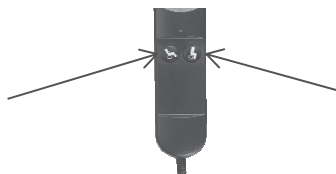


Inclinaison vers l'avant  
et passage en position  
Releveur

## Composition du 'COCOON'

Votre 'COCOON' est composé des éléments ci-dessous :

- 1 – Un dossier
- 2 – Une couette de dossier amovible/lavable
- 3 – Une assise
- 4 – Une couette assise / repose-jambes amovible / lavable
- 5 – Un repose-jambes escamotables / amovibles
- 6 – Deux accoudoirs
- 7 – Deux couettes d'accoudoirs
- 8 – Deux accotoirs
- 9 – Une télécommande 2 boutons Réversible G/D fonction Stop&Start

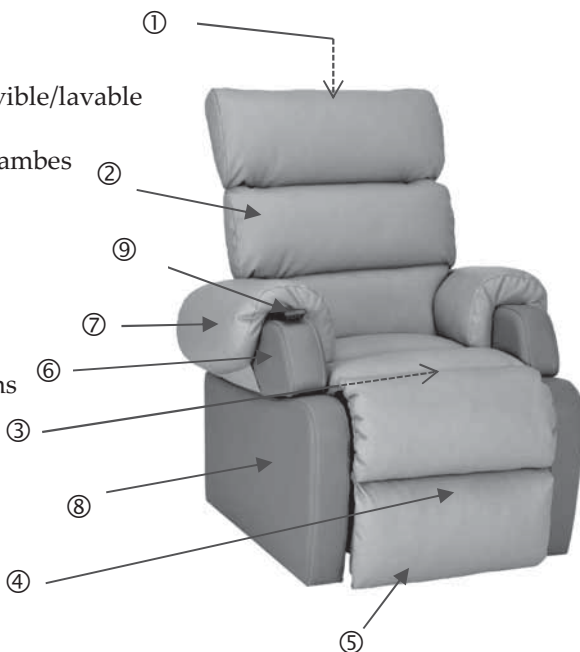

## Accessoires :


Il est possible d'avoir les accessoires suivants en option :

- Tablette (réversible G/D)



- Porte-revues (réversible G/D)

- Kit d'accès soulève-patient

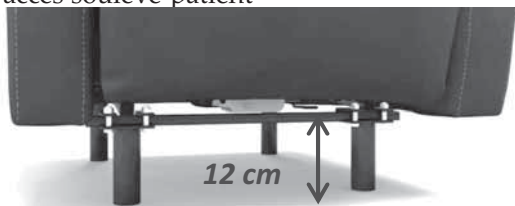

- Kit mobilité (déplacement sans patient)



## **Changement des modules de couettes pour lavage ou remplacement.**

### Couette dossier :

- Enlever le velcro du rabat de la housse situé sur le dos du dossier
- Descendre les 2 zip droit et gauche de la couette

### Couette assise / repose-jambes:

Enlever les velcros situés au fond, à droite et à gauche de l'assise.

### Couette accoudoirs:

- Soulever l'accoudoir et enlevez-le du fauteuil
- Enlever le velcro situé sous l'accoudoir.

Tous les modules peuvent être lavés en machine à 30° C.

Nous vous conseillons de placer ces modules lors de leur lavage, dans un filet à linge ou une taie d'oreiller, afin de préserver leur aspect d'origine.

### **Changement de dossier:**

Il est possible de modifier la profondeur d'assise de votre fauteuil en remplaçant le dossier par un autre.

- Tirer sur le « CLIP » puis sortir le dossier de sa base en suivant les 2 rails de coulissement métalliques,
- Emboîter le nouveau dossier sur la base en suivant les 2 rails de coulissement métalliques, en fixant au parfait enclenchement des 2 parties jusqu'au « CLIC ».

### **PROTOCOLE DE NETTOYAGE POUR LES REVETEMENTS DU 'COCOON' :**

- Tous les détergents, solvants et détachants du commerce, ne figurant pas dans le NF collectivités, sont à **PROSCRIRE IMPERATIVEMENT** ;
- Les tâches d'encre de stylos à bille, demandent un nettoyage immédiat afin d'éviter la migration dans le tissu enduit et devenir ainsi définitives.

### **Garanties**

- Vérin électrique : 5 ans
- Mécanique : 2 ans avec possibilité d'extension de garantie de 3 ans supplémentaires.
- Fauteuil répondant aux normes CEM/EMF (Marquage CE) EN 55014-1 EN55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 62233 Rapport Essai COFRAC
- Poids maximum : 160 kg

# ***COCOON***



***Découvrez la présentation 3D du Cocoon  
sur notre site [www.innov-sa.com](http://www.innov-sa.com)***

