

DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN AVEC DÉCHARGE DE L'APPUI DES TALONS

DISPOSITIF MOULÉ EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME

MATÉRIAUX

80 kg/m³



Mousse Polyuréthane viscoélastique à mémoire de forme moulée



Enduction de Polyuréthane anallergique sur jersey polyester



NF EN ISO 597 - 1 & 2

Lavage support :



(NE PAS IMMERGER)

Lavage housse :



(POSSIBLE JUSQU'À 90°)




DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN (Déhousé)

DISPOSITIF ANTI-ÉQUIN (Houssé mis en situation)




TISSU ENDUIT DE POLYURÉTHANE BI-EXTENSIBLE :


- ↳ Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique.
- ↳ Lutte contre les frictions et cisaillements.
- ↳ Souple et doux au toucher (confort).
- ↳ Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération.
- ↳ Imperméabilisé : hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue.
- ↳ Lavables jusqu'à 90°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid.
- ↳ Traitement d'ignifugation.
- ↳ En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient.

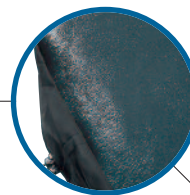

SURFACE ANTI-DÉRAPANTE

- ↳ Favorise le maintien en position du dispositif sur le lit.


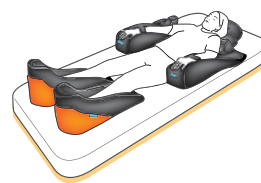


Référence	Modèle		Dimensions
P903T1HW	Dispositif anti-équin livré avec 1 housse		63,5 x 22 x 31 cm
PKABDTAL03	Pack 2 Dispositifs anti-équin + Coussin d'abduction de hanches livrés avec housses		

GARANTIE **2** ANS

DISPOSITIF **ANTI-ÉQUIN****EN MOUSSE VISCOÉLASTIQUE À MÉMOIRE DE FORME MOULÉE**

- La souplesse couplée au caractère « inerte » du matériau, procure une parfaite adaptation aux poussées en cas d'hypertonie en flexion plantaire, permettant ainsi de ne pas majorer la spasticité.
- Permet une excellente absorption des pressions sur les bords latéraux, notamment en cas de pied varus (rotation de l'arrière-pied) ou de rotation de hanche.

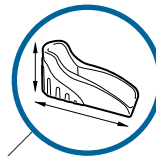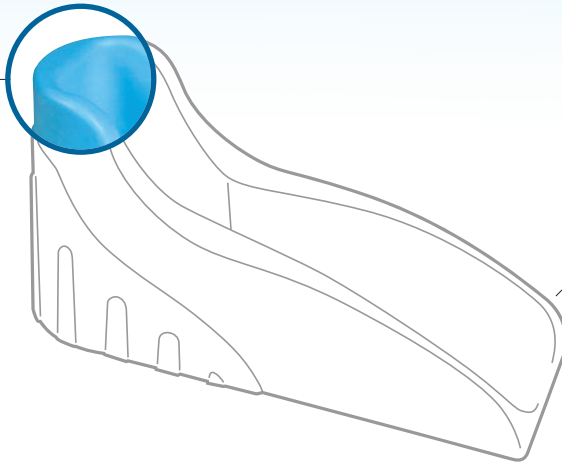**FONCTION ANTI-ÉQUIN ET ANTI-ROTATION DU PIED****HAUTEUR DU DISPOSITIF**

- Épargne l'utilisation de cerceaux de lit.

LONGUEUR DU DISPOSITIF

- Permet le soutien du genou afin d'éviter l'attitude de recurvatum (hyper-extension).

ZONE EN REGARD DU TENDON D'ACHILLE ÉVIDÉE


- Parce que le tendon d'achille est également une zone à fort risque d'escarre.

ZONE DE DÉCHARGE TALONNIÈRE

- Garantit la libération complète de l'appui du talon.

GALBÉ SPÉCIFIQUEMENT ÉTUDIÉ

- Assure une répartition uniforme des pressions du segment jambier.

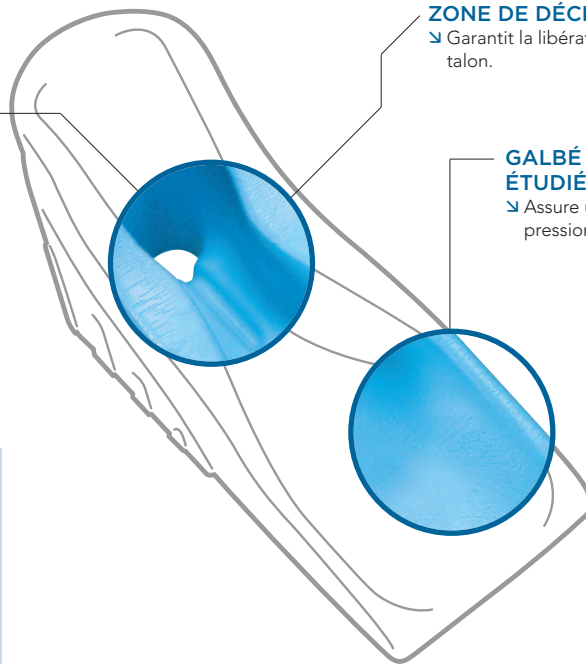

DISPONIBLE EN ASSOCIATION AVEC
LE COUSSIN D'ABDUCTION DE HANCHES

PACK THÉRAPEUTIQUE PKABDTAL03

